

Handelingsschema 22 Volwassenen (HS 22)

Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	<ul style="list-style-type: none"> het effectief en veilig laten verlopen van mondstukbeademing
Benodigdheden	<ul style="list-style-type: none"> het voorgeschreven mondstuk beademingsslangen en bevestigingsstang beademingsmachine niet-steriele handschoenen
Werkwijze aansluiten van beademing	<p>Aansluiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. was of desinfecteer de handen 2. trek niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. controleer of het apparaat voldoende accucapaciteit heeft 5. controleer of de beademingsmachine klaar is om te beademen; zet de beademingsmachine aan. Controleer of de machine lucht geeft zodra het mondstuk wordt aangeraakt. Kies indien van toepassing de instelling voor mondstukbeademing zoals voorgeschreven door het CTB 6. controleer of er een apneualarm gaat wanneer de mondstukbeademing niet gebruikt wordt. (indien dit is ingesteld) 7. positioneer het mondstuk zodanig dat deze voor de zorgvrager makkelijk te benaderen is 8. controleer of de zorgvrager het mondstuk kan bedienen 9. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de machine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht krijgt 10. kijk of de zorgvrager comfortabel is bij gebruik van de mondstukbeademing 11. trek niet-steriele handschoenen uit 12. was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten aansluiten van de beademing	<ul style="list-style-type: none"> • positie mondstuk, check altijd of de zorgvrager goed bij het mondstuk kan en check of de stang goed gefixeerd is • de borstkas komt NIET omhoog terwijl de machine lucht inblaast en de zorgvrager geeft aan dat hij te weinig lucht

	<p>krijgt, al dan niet met alarmen controleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ of de beademingsslang lekvrij is aangesloten ○ of de beademingsslang geknikt is ○ vervang eventueel de beademingsslang <p>Als het probleem niet opgelost bel dan het CTB</p> <ul style="list-style-type: none"> • er klinken alarmen waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is <p>bij aanhoudend alarm: bel het CTB, of fabrikant.</p>
Werkwijze afsluiten van de beademing	<p>Afsluiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. was of desinfecteer de handen 2. trek niet-steriele handschoenen aan 3. informeer de zorgvrager 4. draai de slang en het mondstuk weg van het gezicht van de zorgvrager 5. controleer of de zorgvrager zelf ademt, zich comfortabel voelt en voldoende lucht krijgt of, wanneer de zorgvrager volledig afhankelijk is van beademing, sluit gelijk de maskerbeademing aan 6. zet de machine voor mondstukbeademing uit 7. controleer indien het apparaat is aangesloten op accu van de rolstoel, of het apparaat oplaadt tijdens het opladen van de rolstoelaccu. Of laad de beademingsmachine op via het stopcontact 8. Trek de niet-steriele handschoenen uit 9. was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten afsluiten van de beademing	<ul style="list-style-type: none"> • zorgvrager krijgt te weinig lucht sluit de zorgvrager aan op de beademing start en de beademing • laad het mondstukbeademingsapparaat 1x per week op via een stopcontact, als deze normaal is aangesloten op de accu van de rolstoel