


Verkorte handleiding Stellar 150

voorzijde

De Stellar in vogelvlucht




Achterzijde

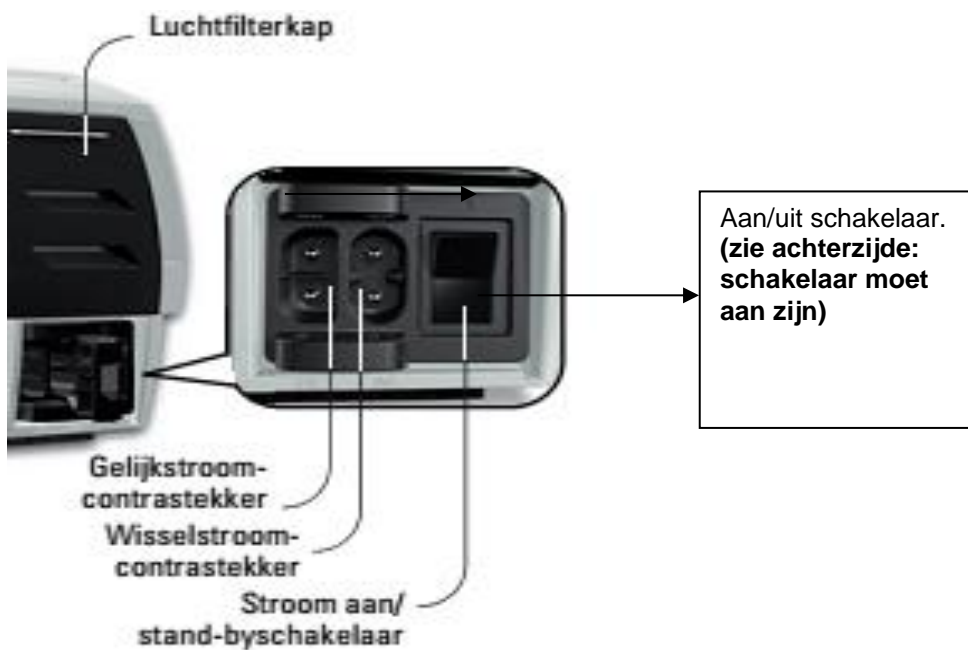

Filter

Vervang het luchtfilter minimaal om de zes maanden.

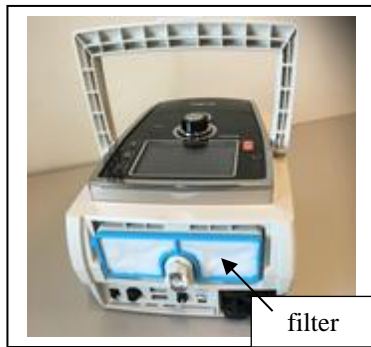

Bevochtiger H4i

De H4i kan op de voorkant van de Stellar worden aangesloten.

Plaats de H4i altijd op een horizontale ondergrond lager dan de patiënt om te voorkomen dat het masker en de slang met water vollopen. U kunt zelf de stand van de bevochtiging bepalen door de draaiknop van de bevochtiger te verzetten. U kunt de voor u meest comfortabele stand kiezen. Stand 1, minimale bevochtiging tot stand 6, maximale bevochtiging.

De bevochtiger werkt alleen wanneer het apparaat aangesloten is op de netstroom!

Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg en grondig gedroogd is voordat u de bevochtiger met Stellar vervoert. Dit om waterschade aan de Stellar te voorkomen!

De H4i kan van de Stellar losgekoppeld worden door op de grote zilverkleurige knop die zich onder op de H4i bevindt. Trek dan gelijktijdig de H4i en de Stellar van elkaar af.

Let op: van te voren altijd waterbakje verwijderen om waterschade aan de Stellar te voorkomen!

Raadpleeg voor reiniging van het re-usable waterbakje de handleiding van de H4i



Start beademing

1. Bevestig de luchtslang op de luchtuitlaat van de Stellar.
2. Plaats het masker op uw gezicht.
3. Druk **kort** op de aan/uit knop om de behandeling te starten.
4. Bevestig het andere einde van de luchtslang aan uw masker.

Stop beademing

1. Verwijder uw masker.
2. Stop de therapie door **kort** de aan/uit knop in te drukken.


U kunt het apparaat helemaal uitschakelen door de stroomschakelaar aan de achterkant van het apparaat eenmaal in te drukken. Voer hierna instructies op het scherm uit.

Instellingen

Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen.

Alarmen

Het toestel kan om diverse redenen alarmen geven. Om het geluid van het alarm te onderdrukken drukt u op de alarmknop. Het geluid wordt nu 2 minuten onderdrukt. Het alarm verdwijnt pas echt als het probleem opgelost is. Tegelijkertijd met het alarm wordt in het display aangegeven waarom het toestel alarmeert.

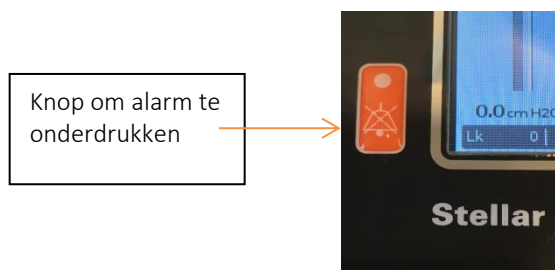

Voor de betekenis van de tekens in het display zie de bijlage **“Alarmen”**.

Probeer het probleem op te lossen. Indien het probleem is opgelost verdwijnt het alarm. Indien u het probleem niet opgelost krijgt kunt u contact opnemen met het Centrum voor Thuisbeademing Rotterdam.

Meest voorkomende alarmen

<i>Op LCD scherm</i>	<i>Oplossen</i>
Interne accu leeg	Sluit electriciteitskabel weer aan of wacht tot de stroomstoring is opgelost. Zie hoofdstuk 'Stroomstoring'
Systeemstoring	Neem contact op met het centrum voor thuisbeademing.
Lekkage	Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest te veel lucht. Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan. <i>Meestal lekkage doordat masker niet goed is aangesloten.</i>

Let op: raadpleeg altijd de originele handleiding voor meer opties!

Accu

De Stellar is uitgerust met een oplaadbare ingebouwde batterij.

De interne accu kan onder normale omstandigheden ongeveer twee uur stroom leveren. Het laadniveau van de accu wordt bovenin het LCD-scherm weergegeven.

Sluit het apparaat op netstroom aan om de interne accu op te laden. Het kan drie uur duren om de interne accu volledig op te laden, maar dit kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en of het apparaat in gebruik is.

Onderhoud van de accu:

De interne accu dient om de zes maanden ontladen en opgeladen te worden.

- 1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact terwijl de Stellar aanstaat (standby of in gebruik) en laat het apparaat op de interne accu werken totdat het laadniveau 50% is.
- 2 Steek de stekker weer in het stopcontact. De interne accu wordt volledig opgeladen.

Onderdelen Stellar



Volledig opgebouwde stellar

