


Verkorte handleiding Stellar 100/150

Voorzijde

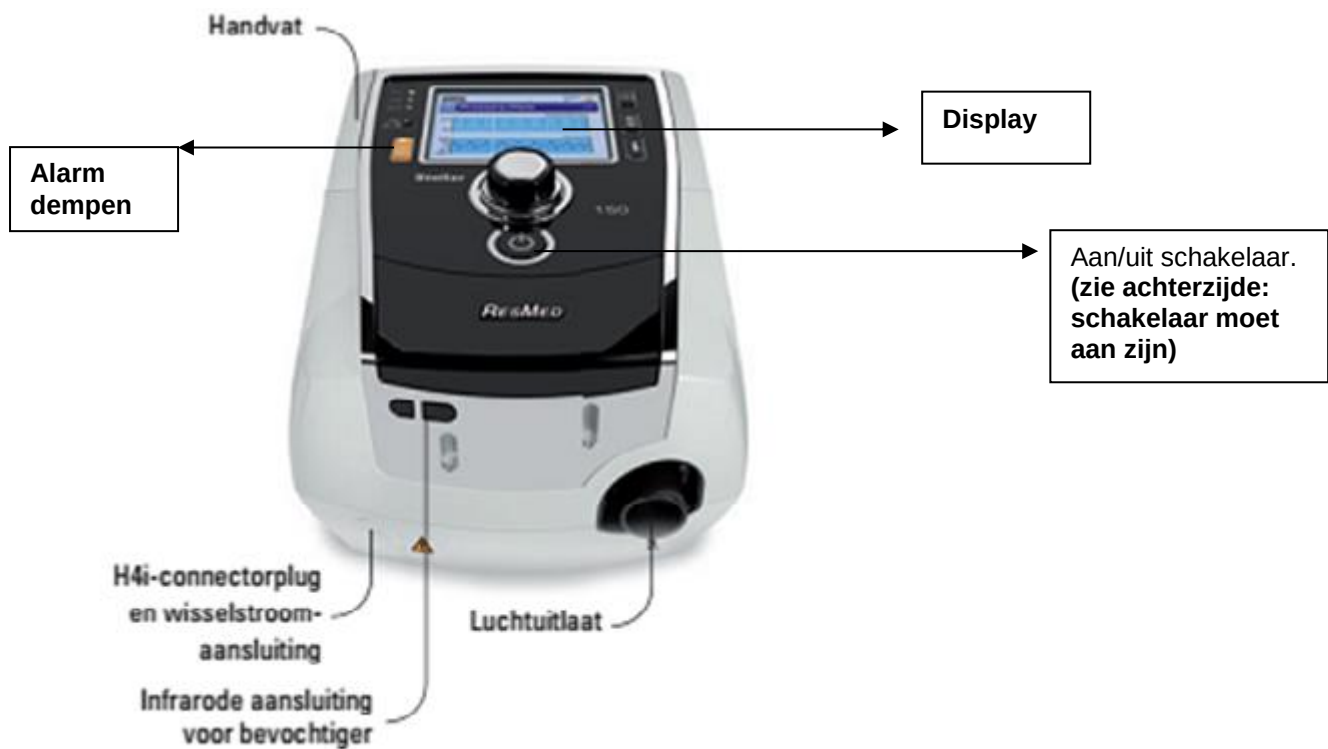

Achterzijde



Filter



Vervang het filter minimaal elke de zes maanden.

Bevochtiger H4i

De H4i kan op de voorkant van de Stellar worden aangesloten. Plaats de H4i altijd op een horizontale ondergrond lager dan de patiënt om te voorkomen dat het masker en de slang met water vollopen. U kunt zelf de stand van de bevochtiging bepalen door de draaiknop van de bevochtiger te verzetten. U kunt de voor u meest comfortabele stand kiezen. Stand 1, minimale bevochtiging tot stand 6, maximale bevochtiging.

De bevochtiger werkt alleen wanneer het apparaat aangesloten is op de netstroom!



H4i bevochtiger

Raadpleeg voor reiniging van het re-usable waterbakje de handleiding van de H4i

De H4i kan van de Stellar losgekoppeld worden door te drukken op de grote zilverkleurige knop die zich onder op de H4i bevindt. Trek dan gelijktijdig de H4i en de Stellar van elkaar af.



Knop om H4i los te koppelen



Let op: van te voren altijd waterbakje verwijderen om waterschade aan de Stellar te voorkomen!

Onderdelen Stellar



De onderdelen van de Stellar en een volledig opgebouwde stellar

Indien u meer dan 16 uur per dag de beademing gebruikt, heeft u recht op een 2^e beademingsapparaat. Raadpleeg uw consulent of dit ook voor u van toepassing is

Start beademing

1. Bevestig de luchtslang op de luchttuitlaat van de Stellar.
2. Plaats het masker op uw gezicht.
3. Druk kort op de aan/uit knop om de behandeling te starten.
4. Bevestig het andere einde van de luchtslang aan uw masker.

Stop beademing

1. Verwijder uw masker.
2. Stop de therapie door kort de aan/uit knop in te drukken.


U kunt het apparaat helemaal uitschakelen door de stroomschakelaar aan de achterkant van het apparaat eenmaal in te drukken. Voer hierna instructies op het scherm uit.

Instellingen

Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen.

Alarmen

Het toestel kan om diverse redenen alarmen geven. Om het geluid van het alarm te onderdrukken drukt u op de alarmknop. Het geluid wordt nu 2 minuten onderdrukt. Het alarm verdwijnt pas echt als het probleem opgelost is. Tegelijkertijd met het alarm wordt in het display aangegeven waarom het toestel alarmeert.

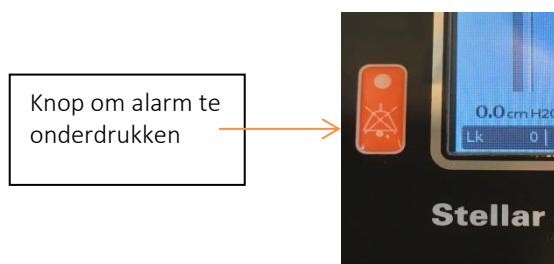

Voor de betekenis van de tekens in het display zie de bijlage **“Alarmen”**.

Probeer het probleem op te lossen. Indien het probleem is opgelost verdwijnt het alarm. Indien u het probleem niet opgelost krijgt kunt u contact opnemen met het Centrum voor Thuisbeademing Rotterdam.

Meest voorkomende alarmen

<i>Op LCD scherm</i>	<i>Oplossen</i>
Interne accu <u>bijna</u> leeg	Sluit apparaat aan op de netstroom of wacht tot de stroomstoring is opgelost. Onderdruk het alarm door op de oranje knop te drukken U kunt de beademing gebruiken tot het alarm 'interne accu leeg' verschijnt
Interne accu leeg	Sluit apparaat aan op de netstroom of wacht tot de stroomstoring is opgelost.
Systeemstoring	Zet apparaat aan achterkant uit en houd de knop 20-30 sec ingedrukt. (tot het scherm niet meer verlicht is) Zet apparaat weer aan Als storing blijft bestaan, neem contact op met het centrum voor thuisbeademing. Onthoud het nummer van de systeemstoring. Dit staat in het scherm
Lekkage	Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest teveel lucht. Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan. Denk hierbij aan: • Positie masker ➡ zet masker opnieuw op • lekkage door mond bij gebruik neusmasker ➡ overweeg kinband • Klep bevochtiger is niet goed gesloten ➡ Sluit klep opnieuw tot u een duidelijke klik hoort • Is zuurstof connector gescheurd ➡ Sluit nieuwe connector aan
Niet geventileerd masker	De gaatjes voor uitademing in het masker zijn verstopt. Was het masker en laat goed drogen. Gebruik tijdelijk uw reservemasker
Circuit afgekoppeld	Er is teveel lekkage Dit alarm kan bijvoorbeeld gaan • als u de machine aanzet en uw masker niet heeft opgezet. • De slang niet goed is aangesloten Als het alarm niet wordt verwijderd, stop dan de beademing en start deze opnieuw

Let op: raadpleeg altijd de originele handleiding voor meer opties!

Accu

De Stellar is uitgerust met een oplaadbare ingebouwde accu.

De interne accu kan onder normale omstandigheden ongeveer twee uur stroom leveren. Het laadniveau van de accu wordt bovenin het LCD-scherm weergegeven.

Sluit het apparaat op netstroom aan om de interne accu op te laden. Het kan drie uur duren om de interne accu volledig op te laden, maar dit is mede afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en of het apparaat in gebruik is.

Wanneer u vaak op pad gaat met de Stellar en dan de beademing onderweg gebruikt, **kunt u externe accu's** van het CTB lenen.

Er zijn ook **auto-acculaders beschikbaar**. Overleg met uw consulent in uw situatie het beste is.

Onderhoud van de accu:

De interne accu dient om de zes maanden ontladen en opgeladen te worden.

- 1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact terwijl de Stellar aanstaat (standby of in gebruik) en laat het apparaat op de interne accu werken totdat het laadniveau 50% is.
- 2 Steek de stekker weer in het stopcontact. De interne accu wordt volledig opgeladen.

Op reis met de Stellar



De stellar past in 2 delen in de bijgeleverde tas.

Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg en grondig gedroogd is voordat u de bevochtiger met Stellar vervoert.



De stellar dient nu wel volledig uitgezet te worden. Dit kan met de aan/uit schakelaar aan de achterkant van het apparaat.

NB dit is een tuimelschakelaar en veert dus terug bij het aan- of uitzetten.

Wanneer u buiten Nederland op reis gaat, raden wij u dringend aan een 2^e apparaat bij het CTB op te halen.

Neem hiervoor minimaal 4 weken voor vertrek contact op met het CTB.

Leercircuittest

Wanneer u een ander masker gaat gebruiken of wanneer beademing ineens anders aanvoelt, kunt u een leercircuit-test doen.

Uitvoeren leercircuit:

1. Sluit de slang en het masker aan op de Stellar
2. Druk 3x achter elkaar op knop met 2 vinkjes (middelste knop, rechts van het scherm)



3. U ziet nu het scherm "opties" met links boven in donkerblauw "leercircuit"



4. Druk nu op de grote ronde knop onder het scherm



5. Draai met deze knop naar links zodat de knop 'start' en druk op de knop

donkerblauw wordt

6. De test start



7. Wanneer de test gelukt is, verschijnt na afloop een lachend gezichtje


8. Klik nu op de knop met de longetjes om terug te keren naar het standaardscherm



Aansluiten van zuurstof via de Stellar (100/150)

Benodigheden:

Stellar 100/150, de aansluiting zit op de achterkant van het apparaat en wordt omringd door het zwarte kapje (zie foto)

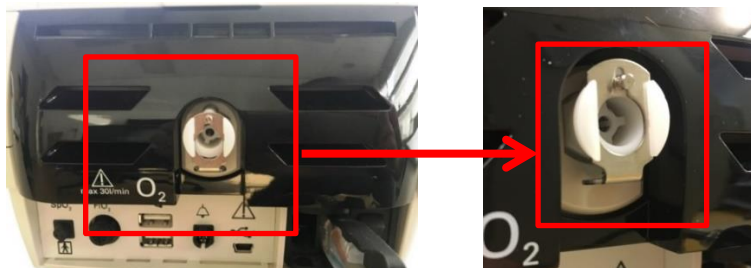

Om de zuurstofconnector te kunnen plaatsen in de aansluiting moet de aansluiting worden geopend. Standaard is deze gesloten (foto 1).



Foto 1: Aansluiting gesloten

Foto 2: Aansluiting open

Duw het metalen plaatje van onderaf naar boven om de aansluiting te openen, u hoort een klikje als dit gelukt is. Het metalen pinnetje springt naar buiten, de aansluiting is nu open. Zie foto 2.

Duw de achterkant van de zuurstofconnectorconnector, met het zwarte ringetje, in de open aansluiting tot u een klikje hoort en het metalen beugeltje naar beneden springt.



zuurstofconnector

Situatie ziet er dan als volgt uit:



De connector zit nu vast in de aansluiting.

U kunt de zuurstofslang aansluiten op de connector.

Neem, als u een nieuwe zuurstofconnector nodig hebt contact op met het CTB (010 703 28 75)

Afsluiten en verwijderen van de zuurstofconnector

Als u geen zuurstof gebruikt is het van belang de connector te verwijderen en de aansluiting af te sluiten om te voorkomen dat er ongefilterde lucht de beademingsmachine in wordt gezogen.

Benodigdheden:

Stellar 100/150 met aangesloten zuurstofconnector (zie foto):



Druk de metalen beugel van onderaf omhoog (zie rode pijl foto boven)

De witte connector schiet automatisch uit de aansluiting en kunt u verwijderen.
(bewaren, niet weggooien!)

U kunt het apparaat nu gebruiken zonder zuurstof.