





Knoppen

De volgende knoppen bevinden zich op het voorpaneel van het apparaat.

1		Knop alarindicator/geluid onderbreken Deze knop heeft twee functies: het schakelt tijdelijk het hoorbare element van een alarm uit en dient daarnaast als alarindicator. Nadat u een alarm hebt onderdrukt, klinkt het alarm weer na een minuut als de oorzaak van het alarm niet is opgelost. Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt het alarm voor een minuut onderdrukt
2		Start/stop-knop Met deze knop schakelt u de luchtstroom in en uit, waarmee de therapie wordt gestart en beëindigd.
3		Knop omhoog/omlaag Met deze knop kunt u navigeren door het beeldschermmenu en apparaatinstellingen wijzigen.
4		Knoppen links en rechts Met deze knoppen kunt u beeldschermopties selecteren en bepaalde handelingen uitvoeren die op het scherm staan weergegeven.

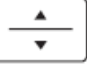

Filter



In de Trilogy zit een grijs schuimrubberen filter dat wasbaar en herbruikbaar is. Het herbruikbare filter verwijdert alle normale huisstof en pollen. U kunt het filter reinigen met warm water en een zacht reinigingsmiddel.

Het filter dient altijd aanwezig te zijn wanneer het apparaat wordt gebruikt.




Apparaat aansluiten:

Gebruik het beademingsapparaat niet terwijl het zich op zijn kant, ondersteboven of in een andere stand bevindt. Zorg ervoor dat de luchtinlaat op de achterzijde van het apparaat niet

geblokkeerd is. Als u de luchtstroom rond het apparaat blokkeert, is het mogelijk dat het beademingsapparaat niet goed werkt.

Steek het stekkeruiteinde van het netsnoer in de netaansluiting aan de zijkant van het apparaat.

U kunt het beademingsapparaat gebruiken met een externe batterij, een afneembare batterij of aansluiten op de accu van uw rolstoel.

Batterij	Symbool
Interne batterij	
Afneembare batterij	
Externe batterij	

Wanneer geen netspanning beschikbaar is, verschijnt rond de batterij die actief voeding levert aan het apparaat een zwart vak



Wanneer het apparaat nog ongeveer twintig minuten kan draaien op accu, wordt de binnenkant van het vak rond het batterijsymbool geel.

Bij nog ongeveer 10 min wordt de binnenkant van het vak rood

Wanneer de Trilogy is aangesloten op netspanning, ziet u rechts onderin een groen lampje branden.


Afneembare batterij:




Opbouw van het circuit

Plaats filter op de uitgang van de Trilogy.

Sluit op het filter de slang aan en het door u gebruikte mondstuk zoals op onderstaand plaatje te zien is.

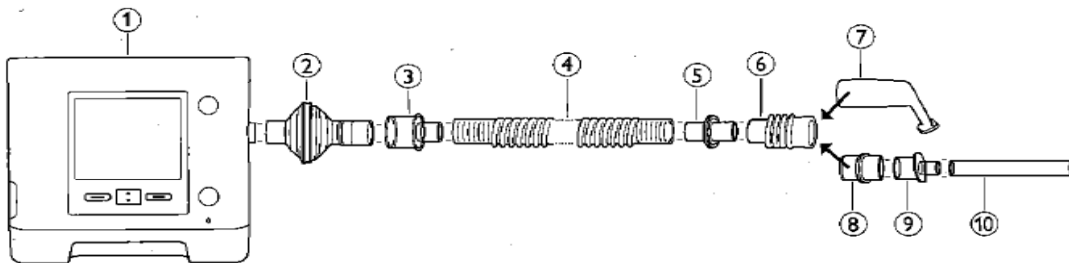

Note: The circuit tubing may be cut to length: 3' (.9m) minimum.

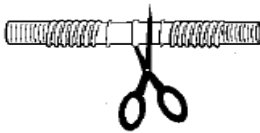

Assembly Key

- 1 = Trilogy Ventilator
- 2 = Bacteria Filter
- 3 = Reducer Cuff
- 4 = 6' (1.8m) Circuit Tubing (15mm)
- 5 = Coupler
- 6 = Miniature Flextube (Optional)
- 7 = Angled Mouthpiece
- 8 = Adapter
- 9 = Barb Connector
- 10 = Straw Mouthpiece

Reinig de slang 1x per week met een zacht reinigingsmiddel. Spoel de slang daarna goed door en laat drogen.