

Verkorte handleiding Ventilagic LS

Accu

De Ventilagic is uitgerust met een oplaadbare ingebouwde batterij.


De interne accu kan onder normale omstandigheden ongeveer twee uur stroom leveren. Het laadniveau van de accu wordt bovenin het LCD-scherm weergegeven. Sluit het apparaat op netstroom aan om de interne accu op te laden. Het kan drie uur duren om de interne accu volledig op te laden, maar dit kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en of het apparaat in gebruik is.

Onderhoud van de accu

De interne accu dient om de zes maanden ontladen en opgeladen te worden.

- 1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact terwijl de Ventilagic aanstaat (standby of in gebruik) en laat het apparaat op de interne accu werken totdat het laadniveau 50% is.
- 2 Steek de stekker weer in het stopcontact. De interne accu wordt volledig opgeladen.

Bedieningsfolie

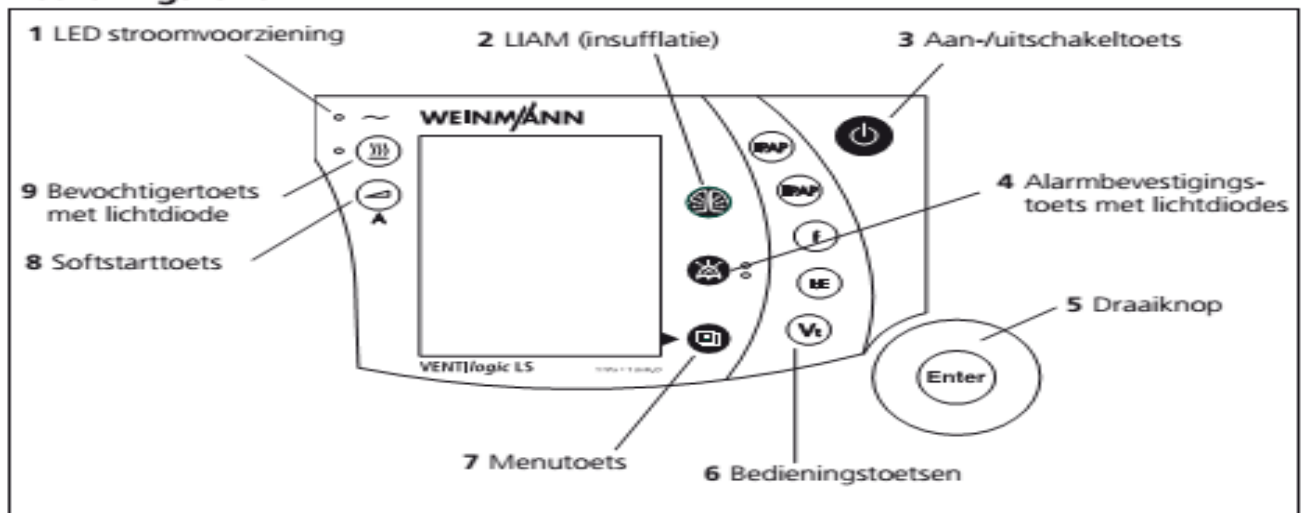

Legenda

1 LED stroomvoorziening

De groene LED brandt wanneer er een stroomvoorziening aanwezig is.

2 LIAM (insufflatie)

Wordt gebruikt voor het activeren van een hoestproces of voor de zuchtbeademing.

3 Aan-/uitschakeltoets

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van het therapieapparaat.

4 Alarmbevestigingstoets met lichtdiodes

De alarmbevestigingstoets is bestemd om alarmen tijdelijk stom te schakelen. De lichtdiode is bestemd om de alarmen optisch weer te geven.

5 Draaiknop

Centraal bedieningselement van het therapieapparaat, dient om in het menu te navigeren.

6 Bedieningstoetsen

Worden gebruikt voor de snelle instelling door de, zijn in de patiëntenmodus geblokkeerd.

7 Menutoets


Wordt gebruikt voor het wisselen van de standaardweergave in het menu en omgekeerd.

8 Softstarttoets

Is bestemd voor het activeren van de softstart en voor het instellen van de softstartduur tot aan de in het menu ingestelde maximale softstarttijd.


9 Bevochtigertoets met lichtdiode

Wordt gebruikt voor het instellen van de bevochtigingsstand. Er zijn zes standen beschikbaar. De lichtdiode geeft aan of de bevochtiger geactiveerd is.

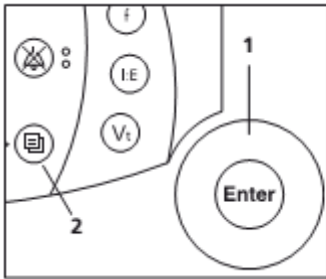

De draaiknop (1) is het centrale bedieningselement van de VENTIlogic LS. Met de draaiknop kunt u menupunten selecteren, in de menuvensters navigeren en waarden voor individuele menupunten instellen.

Om zich met de navigatie per draaiknop vertrouwd te maken, is het raadzaam om eerst in het **Menu** te schakelen. Druk hiervoor op de menutoets (2). Dan kunt u de hierna beschreven functies proberen.

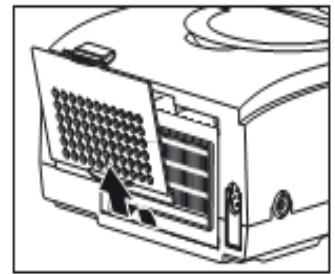

Filter

Eenmaal per maand dient u het filter uit te nemen en schoon te maken. Het grof -stof filter kan gereinigd worden, het fijn-stoffilter kan alleen gewisseld worden voor een nieuwe. Zie voor de procedure de originele handleiding.

Inschakelen

1. Bevestig de luchtslang op de luchtuitlaat van de Ventilagic.



2. Sluit de dunne slang van de uitademingsklep aan op de nippel voor de uitademings slang. Deze slang stuurt de uitademingsklep aan , deze gaat open als u uitademt.



3. Sluit de groene slang van de druklijn connector aan op de nippel van drukmeting. Deze meet de druk in het systeem en beschermt o.a. tegen te hoge druk in het systeem.



4. Druk **kort** op de aan/uit knop om de behandeling te starten.
5. Bevestig het andere einde van de luchtslang aan de canule.

Uitschakelen

1. Ontkoppel de slang van de canule..
2. Stop de therapie door **kort** de aan/uit knop in te drukken.

U kunt het apparaat helemaal uitschakelen door de stroomschakelaar aan de achterkant van het apparaat eenmaal in te drukken. Voer hierna instructies op het scherm uit.

Instellingen




Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen.

Alarmen

Het toestel kan om diverse redenen alarmen geven. Om het geluid van het alarm te onderdrukken drukt u op de alarmknop. Het geluid wordt nu 2 minuten onderdrukt. Het alarm verdwijnt pas echt als het probleem opgelost is. Tegelijkertijd met het alarm wordt in het display aangegeven waarom het toestel alarmeert. Voor de betekenis van de tekens in het display zie de bijlage "**Alarmen**". Probeer het probleem op te lossen. Indien het probleem is opgelost verdwijnt het alarm. Indien u het probleem niet opgelost krijgt kunt u contact opnemen met het Centrum voor Thuisbeademing Rotterdam.

Alarmsymbolen

Als er meerdere alarmen gelijktijdig geactiveerd worden, vindt de indicatie ervan overeenkomstig de hierna vermelde hiërarchie plaats:

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | 1. alarmen met hoge prioriteit |
|  | 2. alarmen met gemiddelde prioriteit |
|  | 3. alarmen met lage prioriteit |

Meest voorkomende alarmen

Interne accu leeg	Sluit elektriciteitskabel weer aan of wacht tot de stroomstoring is opgelost. Zie hoofdstuk 'Stroomstoring'
Systeemstoring	Neem contact op met het centrum voor thuisbeademing.
Ipap/druk hoog of VT/volume laag	Ergens in het systeem is de druk hoog, bijna altijd obstructie in de canule. Zuig slijm weg of verwissel de binnencanule.
Ipap/druk laag, lekkage of VT/volume hoog	Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest te veel lucht. Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan.

Let op: raadpleeg altijd de originele handleiding voor meer opties!