

Verkorte handleiding VPAP IV



Opbouw systeem en start behandeling

1. Steek het electriciteitsnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van het apparaat, steek het andere uiteinde in het stopcontact



2. Bevestig de luchtslang op de uitlaat van de VPAP IV
3. Plaats masker op uw gezicht.
4. Druk kort op start/stop knop om therapie te starten
5. Bevestig andere uiteinde van de luchtslang aan uw masker

Bevochtiger H4i

De VPAP IV kan met en zonder bevochtiger gebruikt worden.



VPAP IV met H4i



VPAP IV zonder H4i

De bevochtiger kan aan de voorkant van de VPAP 4 worden aangesloten.

Plaats de bevochtiger altijd op een horizontale ondergrond, lager dan de patiënt, om te voorkomen dat het masker en de slang vollopen met water.

U kunt zelf de stand van de bevochtiger bepalen door aan de draaiknop van de bevochtiger te verzetten. Kies de voor u meest comfortabele stand.

Stand 1= minimale bevochtiging

Stand 6= maximale bevochtiging

Zorg dat het waterreservoir leeg en grondig gedroogd is voordat u de bevochtiger vervoert. Dit om waterschade aan de VPAP IV te voorkomen.

De bevochtiger kan losgekoppeld worden van de VPAP IV door de grote zilverkleurige knop die zich onder op de bevochtiger bevindt. Druk deze knop in en trek dan gelijktijdig de bevochtiger van de VPAP IV. Leeg wel eerst het waterbakje!!

Filter.

Deze bevindt zich aan de achterzijde van de VPAP IV.



NB: Plaats het filter met de blauwe zijde naar buiten

Alarmen:

Systeemstoring	Neem contact op met het centrum voor thuisbeademing.
Lekkage	Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest te veel lucht. Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan. <i>Meestal lekkage doordat masker niet goed is aangesloten.</i>

In het display kunt u lezen waarom het toestel alarmeert.

U kunt het alarm onderdrukken door op de start/stop knop te drukken. Indien u op deze knop drukt bij een alarm, zal de beademing niet stoppen, maar alleen het alarm onderdrukken.

Indien u het probleem niet opgelost krijgt, kunt u contact opnemen met het centrum voor thuisbeademing.