


Verkorte handleiding Weinmann Accuvac

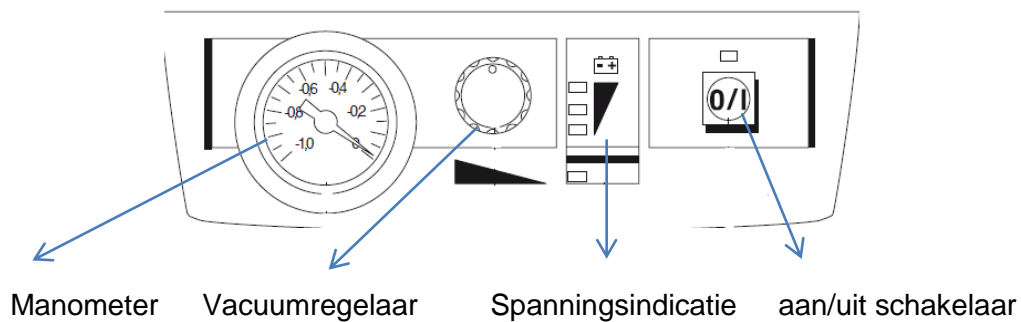

Verbindingsslang van pomp naar opvangbak

Plaats aan de slang van opvangbak naar pomp, altijd een filter.

Let op dat altijd de kant met 'patiënt' gericht is naar de opvangbak

Sluit de slang aan zoals op de foto te zien is.




Aansluiten opvangreservoir:

Plaats de serres opvangzak in de houder, druk deze goed aan en sluit de verbindingsslang met vingertip aan zoals op de foto.



Gebruik

Sluit het apparaat aan op de netspanning of op de sigaretten aansteker van de auto.

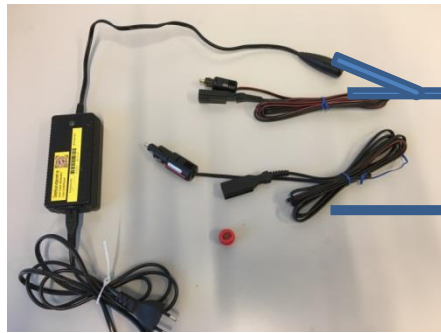

Snoeren voor 220V

Autolader



Autolader



Rode dopje is altijd nodig

Uitzuigen:

Druk op de toets O/I. De onderste groene LED van de spanningsindicatie en de groene LED van de toets O/I branden.

Stel met de regelknop de gewenste maximale vacuüm in terwijl u met uw vingers slang afsluit.

Gebruik het handelingschema van het CTB om op de juiste manier uit te zuigen.



Na gebruik:

Zuigslang goed naspoelen met water.

Opvangreservoir **niet meer dan ¾** vullen!!

Voorkom dat het filter nat wordt. Een nat filter vermindert de zuigkracht.

Storingen

Apparaat start niet, O/I- indicatie en capaciteit- weergaveband tonen bedrijfsklare toestand	Pomp defect	CTB bellen
Apparaat start niet, O/I indicatie en capaciteitweergaveband tonen geen bedrijfsklare toestand	Accu diep ontladen	Meerdere laad en ontladcycli doorlopen. Indien geen succes, contact CTB
Apparaat kan niet in- of uitgeschakeld worden	Elektronica is defect	CTB bellen
Apparaat bereikt maximale zuigkracht niet binnen 20 sec	Lekkage in het zuigsysteem Apparaat is onvoldoende geladen Pomp defect	Controleer alle verbindingen slang en zuigpot Accu laden CTB bellen