


Verkorte handleiding Asskea uitzuigapparaat



- Filter
- Aan/uit schakelaar
- Opvangbak

Regelunit:

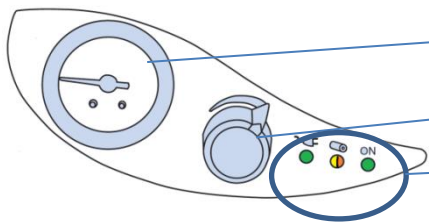

- Vacuüm manometer
- Vacuüm regelknop
- LED indicatoren

Verbindingslang van pomp naar opvangbak

Plaats aan de slang van opvangbak naar pomp, altijd een filter.

Let op dat altijd de kant met 'patiënt' gericht is naar de opvangbak

Sluit de slang aan zoals op de foto te zien is.



Aansluiten opvangreservoir:

Plaats de serres opvangzak in de houder, druk deze goed aan en sluit de verbindingsslang met vingertip aan zoals op de foto.



Gebruik:

Sluit het apparaat aan op de netspanning of op de sigaretten aansteker van de auto.



Uitzuigen:

Schakel de hoofdschakelaar in, het groene controle lampje onder 'on' moet branden.

Stel met de regelknop de gewenste maximale vacuum in terwijl u met uw vingers slang afsluit

Gebruik het handelingsschema van het CTB om op de juiste manier uit te zuigen.















Na gebruik:

Zuigslang goed naspoelen met water.

Opvangreservoir **niet meer dan $\frac{3}{4}$** vullen!!

Voorkom dat het filter nat wordt. Een nat filter vermindert de zuigkracht.

	Permanent 	Apparaat is aangesloten op netspanning
	Permanent 	Lichtnet-adaptor is aangesloten, maar spanning niet
	Permanent 	Netspanning niet voldoende, apparaat schakelt automatisch uit.
	Permanent 	Accu 100-40%
	Permanent 	Accu 40-10%
	Permanent 	Accu < 10%. Sluit direct lichtnet-adaptor of autoaccu aan
	Permanent  ondanks aansluiten netsnoer	Accu is defect, gebruik alleen mogelijk met lichtnet-adaptor
	Knipperend 	Batterij laadt op
	Knipperend 	Temperatuurbeveiliging. Opladen onderbroken totdat accu voldoende is afgekoeld
ON	Permanent 	Pomp staat aan