

Verkorte handleiding Atmos (Atmoport)uitzuigapparaat




Filter

Aan/uit schakelaar

Opvangbak

Netvoeding

Autoadaptor

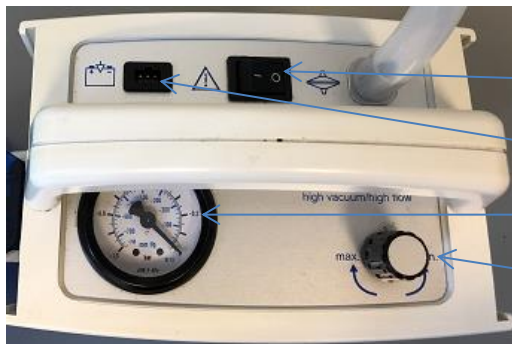

Aan/uit knop

Aansluiting voor netstroom of acculader

Vacuüm manometer

Vacuüm regelknop

Verbindings slang van pomp naar opvangbak

Plaats aan de slang van opvangbak naar pomp, altijd een filter.

Let op dat altijd de kant met 'patiënt' gericht is naar de opvangbak.

Sluit de slang aan zoals op de foto te zien is.



Aansluiten opvangbak:

Plaats de serres opvangzak in de houder, druk deze goed aan en sluit de verbindingsslang met vingertip aan zoals op de foto.

Controleer of het apparaat voldoende zuigkracht opbouwt door de verbindingsslang af te sluiten.



Gebruik:

Sluit het apparaat aan op de netspanning of met de auto-adaptor op de sigaretten aansteker van de auto.

Zie foto's bovenaan.

Uitzuigen:

Schakel met de aan/uit knop het apparaat in.

Stel met de regelknop de gewenste maximale vacuüm in terwijl u met uw vingers de slang afsluit.



Gebruik het handelingschema van het CTB om op de juiste manier uit te zuigen.

Na gebruik:

Zuigslang goed naspoelen met water.

Opvangzak **niet meer dan ¾** vullen!!

Voorkom dat het filter nat wordt. Bij een nat filter kan de zuigkracht wegvallen.

Verschoon het opvangzak minimaal **1x per week**.

Opladen:

Ook als het apparaat niet wordt gebruikt, moet het apparaat minimaal 1x per maand opgeladen worden.