


# Verkorte handleiding Medela Basic 30

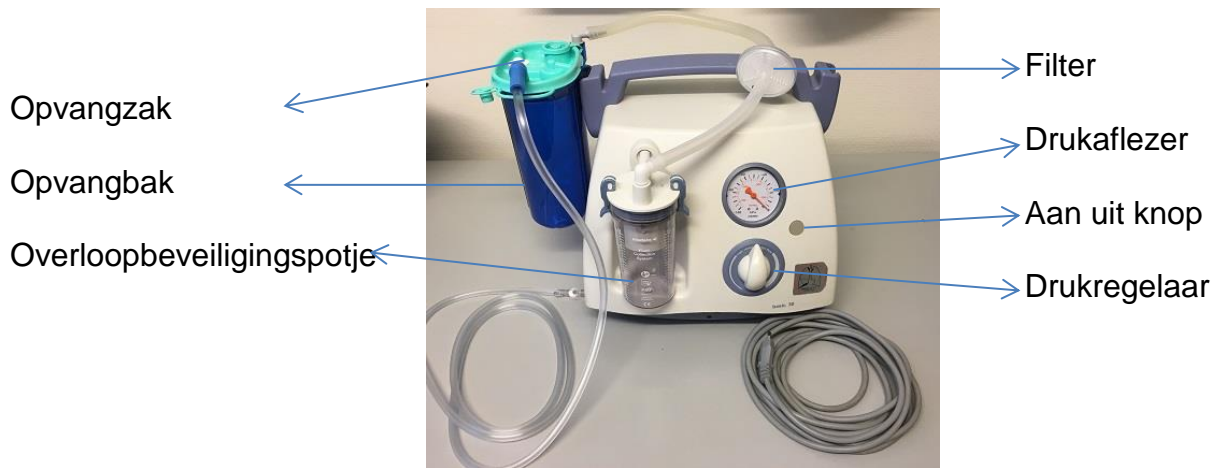

## Verbindingslang van pomp naar opvangbak

Plaats aan de slang van opvangbak naar pomp, altijd een filter.

Let op dat altijd de kant met 'patiënt' gericht is naar de opvangbak.

Sluit de slang aan zoals op de foto te zien is.



## Aansluiten opvangzak:

Plaats de serres opvangzak in de houder, druk deze goed aan en sluit de verbindingsslang met vingertip aan zoals op de foto.



## Gebruik:

Sluit het apparaat aan op de netspanning.

N.B. De Medela Basis heeft géén interne accu.

### **Uitzuigen:**

Zet het apparaat aan met de aan/uit knop. Het groene lampje in de knop gaat branden.

Stel met de regelknop de gewenste maximale vacuüm in terwijl u met uw vingers slang afsluit.

Gebruik het handelingsschema van het CTB om op de juiste manier uit te zuigen.



### **Na gebruik:**

Zuigslang goed naspoelen met water.

Opvangzak **niet meer dan  $\frac{3}{4}$**  vullen!!

Voorkom dat het filter nat wordt. Een nat filter vermindert de zuigkracht.

Verschoon de opvangzak minimaal 1x per week.