

Gebruiksaanwijzing hoestmachine Philips E70

Schermopties en bediening



Knop voor handmatige bediening. Deze is meestal uitgeschakeld.

Aan/uit knop.

Knop om behandeling te starten.

Menu waarin u (indien ingesteld door de behandelaar) kunt kiezen uit maximaal drie vooraf ingestelde therapie-opties.

Hiermee kunnen enkele menuopties worden gekozen.
NB: De instellingen zijn hierin niet te wijzigen.




luchtfilter

Wisselstroomingang. Sluit het netsnoer hier aan.

Aansluiting voor de saturatiemeter

Opbouw van de hoestmachine

Sluit altijd eerst het bacteriefilter aan op het aansluitpunt, gevolgd door de bijgeleverde slang.

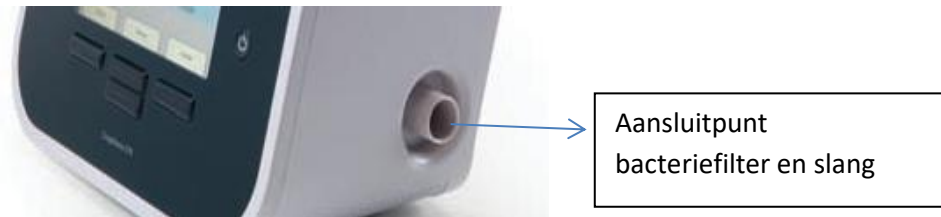

Voorbeeld van de juiste opstelling



Voorbeeld opbouw slangenset bij gebruik met een masker



Voorbeeld opbouw slangenset bij gebruik met een canule



Starten van de behandeling

1. Zet de machine aan met de aan/uit knop
2. Sluit, indien voorgeschreven, de saturatiemeter aan
3. Zet de hoestmachine aan en controleer of de machine positieve en negatieve druk opbouwt
4. Plaats het masker van de hoestmachine op het gezicht of plaats de slang op de tracheacanule
5. Druk op knop om behandeling te starten.
6. Laat het mondneusmasker van de hoestmachine op het gezicht/ slang op canule staan gedurende vijf hoestcycli (één cyclus bestaat uit een inademing, een uitademing en een pauze). Vijf cycli vormen één sessie.
7. Vijf van deze sessies vormen één behandeling (tenzij anders is voorgeschreven),
8. De zorgverlener telt het aantal cycli.
9. Beëindig elke sessie met een inademing.
10. Neem het mondneusmasker/slang van de hoestmachine weg.
11. Pas, indien voorgeschreven, compressie toe tijdens elke Uitademingsfase.
12. Zet de hoestmachine uit.
13. Indien aanwezig, verwijder het opgehoeste slijm uit het mondneusmasker/slang en maak de slang schoon.

Onderhoud van de machine en de onderdelen

Het buitenoppervlak

De hoestmachine kunt u met een mild reinigingsmiddel 1x per week schoonmaken.

Het luchtfilter

Het luchtfilter dient éénmaal in de twee weken schoongemaakt te worden.

1. U kunt het filter uitwassen met een mild reinigingsmiddel.
2. Spoel het luchtfilter goed uit.
3. Droog terugplaatsen.



Eénmaal per 6 maanden dient het filter vervangen te worden.

Het patientencircuit:

Masker en slangen dienen regelmatig (minimaal 1 x per week) schoongemaakt te worden met een mild reinigingsmiddel. Daarna grondig spoelen. De onderdelen dienen volledig droog te zijn voordat ze weer gebruikt worden.

Het bacteriefilter:

Het bacteriefilter dat het apparaat beschermt tegen vanaf de patiënt meegevoerd materiaal (vb. sputum), kan blijven zitten zolang het niet verstopt is of zichtbaar verontreinigd is. Het filter **niet** nat of schoonmaken.

