


HANDLEIDING SENTEC TRANSCUTANE OXYCAPNOGRAFIE METER: AAN- EN AFSLUITEN

De Sentec thuis installeren:


Plaats de Sentec op een tafel/nachtkastje en zet de transformator op de grond. Let hierbij op dat u er 's nachts niet over kunt vallen!

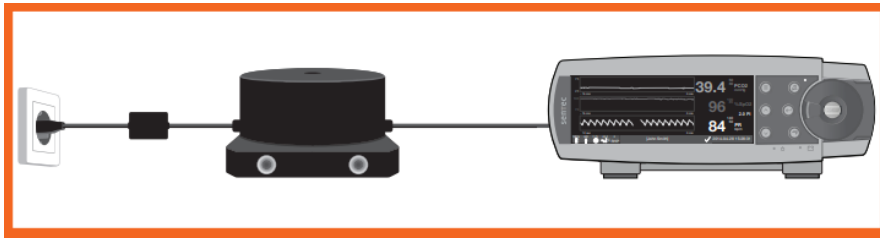

Sluit het snoer aan op de netstroom en verbindt dit snoer met de transformator. Het snoer van de transformator past weer in de sentec. (zie witte pijl op foto hieronder)

Het apparaat aanzetten:

1. Zet het apparaat aan met de zwarte tuimelknop aan de achterkant van het apparaat (rode pijl, onderstaande afbeelding).

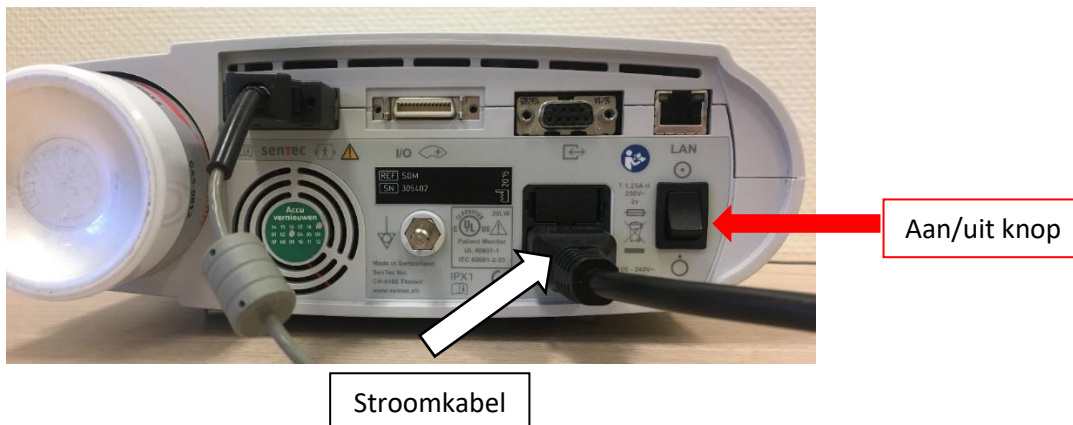

2. Apparaat gaat aan en geeft aan in het scherm 'Sensor kalibratie' (zie foto onder)



3. Na een aantal minuten zelfkalibratie geeft het apparaat aan 'Klaar voor gebruik' (zie foto onder)



4. Ontvet de oorlel met een alcoholdoekje
5. Verwijder de twee witte beschermfolies van de oorclip
6. Plak de oorclip op de oorlel zo dat het rondje aan de voorzijde van de oorlel zit
7. Op de oorlel in het rondje van de oorclip twee druppels gel aanbrengen
8. Haal de sensor (met het rode lichtje, zie foto) uit het deurtje (witte kader) van het apparaat en klik deze vast op de oorclip.



9. Sluit het deurtje van het apparaat, de meting start nu automatisch

De meting afsluiten

10. Als de meting klaar is de sensor van het oor afhalen en **SCHOONMAKEN MET ALCOHOLDOEKJE!**
11. Het deurtje van de meter openen en de sensor **DIRECT** hierin bevestigen, zodanig dat u tegen het rode lampje aan kijkt. Vervolgens het deurtje sluiten (zie afbeelding bij 8.)

LET OP: ZODRA DE METING IN DE OCHTEND WORDT GESTAAKT **DIRECT** DE SENSOR **SCHOONMAKEN**, **TERUGPLAATSEN** EN HET **DEURTJE SLUITEN**

12. Op het scherm van de meter verschijnt nu de tekst: 'sensor kalibreren'
13. Wacht tot er in het scherm staat 'klaar voor gebruik' (zie foto onder)



15. **Meter mag niet worden uitgeschakeld!**

Wilt u extra uitleg, dan kunt u de QR code scannen die op de sentec is geplakt. U krijgt dan een filmpje met uitleg te zien.