



Prismavent 50C Verkorte handleiding

1. Voorkant beademingsmachine

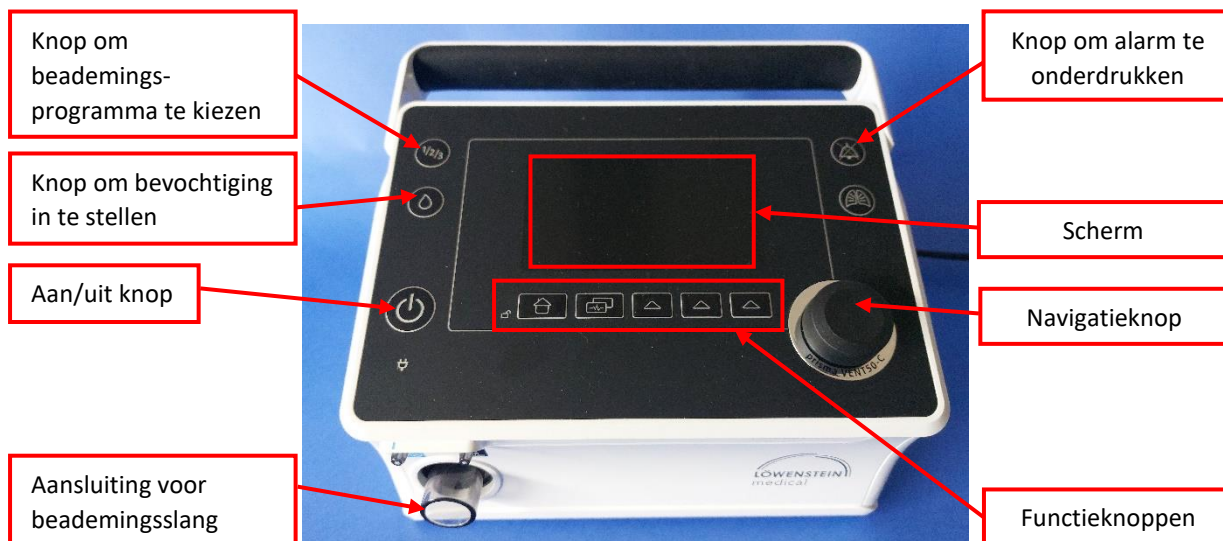

2. Achterkant beademingsmachine

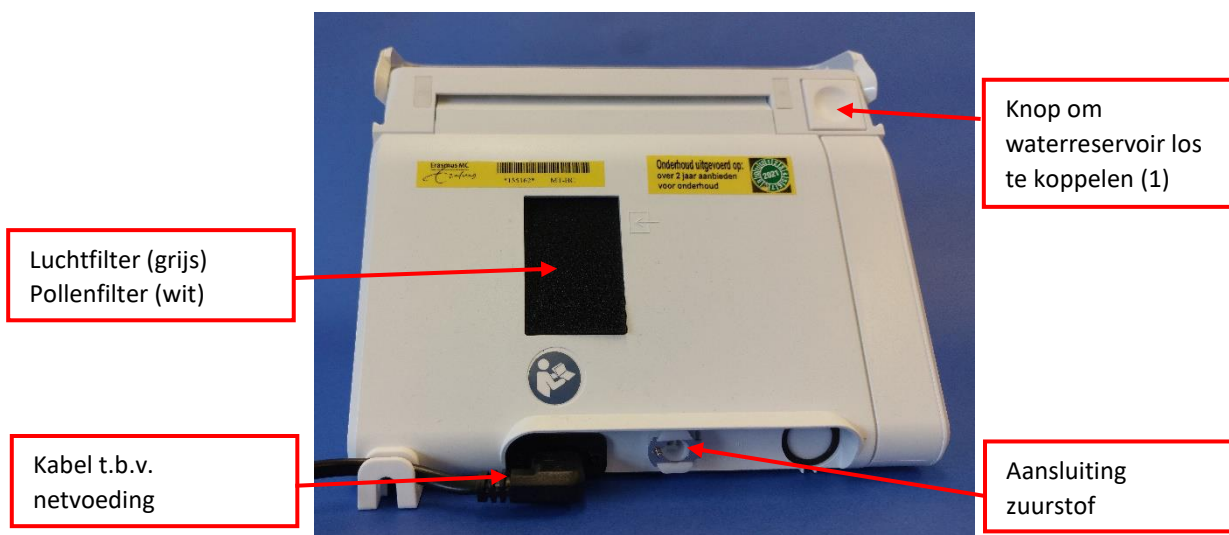

3. Bevochtiger



De bevochtiger is links aan de zijkant van de prismavent te klikken. Verwijder hiervoor eerst de witte afsluitklep door de drukknop aan de achterzijde in te drukken (zie foto boven (1)). Vervolgens kan de bevochtiger worden aangesloten (zie foto onder)




4. Vullen van het waterbakje


Het waterbakje kan op 2 manieren worden gevuld:

1. Door het reservoir te openen

- Druk op 'knop om waterreservoir los te koppelen' (1), trek tegelijkertijd de bevochtiger los van de beademingsmachine.
- Volg onderstaande stappen (afbeeldingen van links naar rechts)

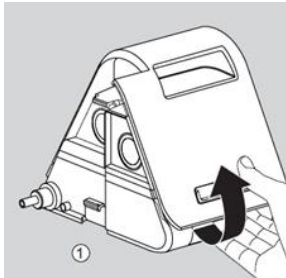

1. Klik het reservoir open

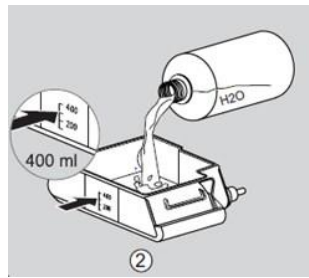


2. Vul het reservoir met maximaal 400 ml koud kraanwater



3. Sluit de bevochtiger weer aan op het apparaat

2. Via bijvulopening aan de zijkant

- Druk op 'knop om waterreservoir los te koppelen' (1), trek tegelijkertijd de bevochtiger los van de beademingsmachine.
- Draai de bevochtiger op de linker zijkant, zodanig dat de beide openingen (1, 2) en het verwarmingselement (3) zichtbaar zijn (zie foto onder)
- Vul de bevochtiger onder een kraan met koud water tot max. 400 ml (zie rode vierkant voor markering)
- Sluit de bevochtiger weer aan op het apparaat.

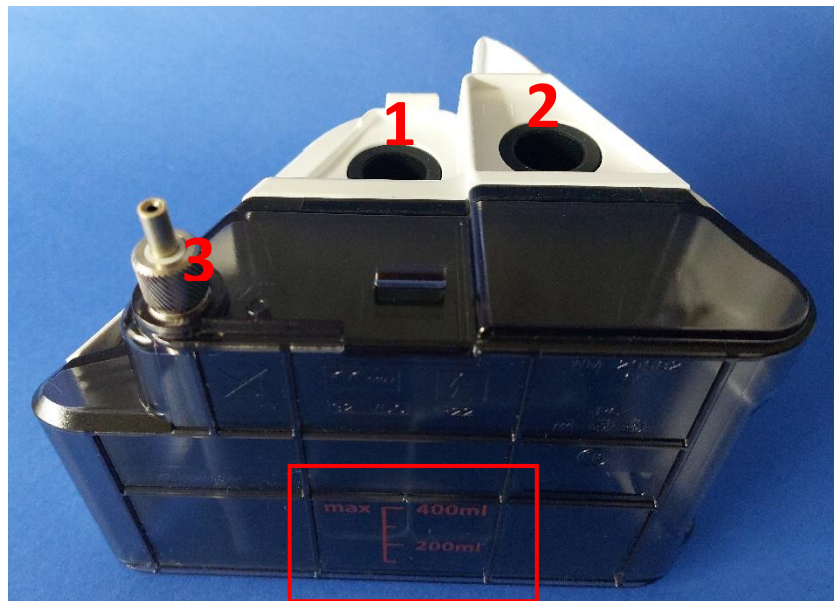

5. Stand van bevochtiger aanpassen (hoger of lager zetten)

Aanpassen van de luchtbevochtiging gaat het best tijdens de beademing.

U drukt de bevochtigingstoets (foto pagina 1 'knop om bevochtiging in te stellen') lang in.

U kunt nu de "bevochtigungsstand" zelf wijzigen door te draaien aan de navigatieknop (1-5).


Stel deze in op de gewenste stand en druk nogmaals op de navigatieknop om uw keuze te

bevestigen. Door op de hometoets  te drukken keert u weer terug naar het

beginmenu. Hoe hoger de stand, hoe warmer en vochtiger de beademingslucht wordt.

6. Beademing starten


1. Vul het waterbakje zoals hierboven beschreven
2. Sluit de beademingsslang aan op de aansluiting voorop de prismavent
3. Plaats het masker op uw gezicht
4. Start de beademing door de aan/uit knop kort in te drukken

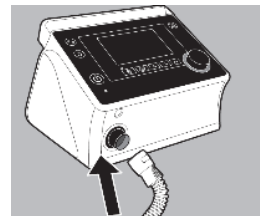

N.B. als het scherm zwart is, **kort** op de aan/uit knop drukken om toestel aan te zetten

7. Beademing stoppen

1. Zet het masker af
2. Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot het scherm 'therapie beëindigen' uit beeld verdwijnt.
3. De alarmbel/resettoets gaat knipperen en er klinkt een piepje (alarm). In het scherm verschijnt de een rode melding 'therapie beëindigd'
4. Druk eenmaal op de alarmbel/resetknop om het alarm uit te schakelen.
5. Het apparaat staat weer in stand by modus, het display valt na ca. 1 minuut weer uit.

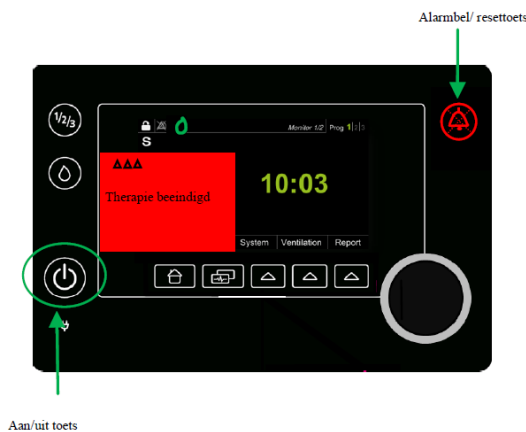

8. Instellingen

Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen.

9. Alarmen

Alarmen zijn ingedeeld in 3 prioriteitsstanden:

- Lage prioriteit: ▲
- Gemiddelde prioriteit: ▲ ▲
- Hoge prioriteit: ▲ ▲ ▲

U kunt het geluid van het alarm voor 120 sec onderdrukken door kort op de alarmbel/ reset toets te drukken. De alarmbevestigingstoets knippert totdat de storing verholpen is.

Meest voorkomende alarmen:


Hoge lekkage	Controleer of slang en masker goed zijn aangesloten
Lekkage laag	Check slangensysteem en uitademingsgaatjes masker
Apparaat werkt op accu	Controleer of apparaat is aangesloten op netstroom
Laadtoestand accu kritiek	Accu leeg <10%. Sluit apparaat aan op netstroom
Laadtoestand zeer kritiek	Accu leeg < 5%. Sluit apparaat aan op netstroom
Disconnectie. Ademslang en patiëntenaansluiting controleren	Verbinding van het apparaat via de ademslang tot aan de beademingsingang bij de patiënt controleren.
Aanzuiggebied verdekt. Houd het aanzuiggebied vrij	Zorg dat het aanzuiggebied vrij is. Dit is het plaats op de achterkant, van het filter

10. Accu

De Prismavent 50C beschik over een oplaadbare ingebouwde accu.

Onder normale omstandigheden kan deze 12 uur stroom leveren. Het laadniveau van de accu wordt weergegeven links onderin het scherm (foto onder, blauw kader).

N.B. bij gebruik van de machine op de accu werkt de bevochtiger niet. De machine maakt hiervan ook een melding (groen schermpje)

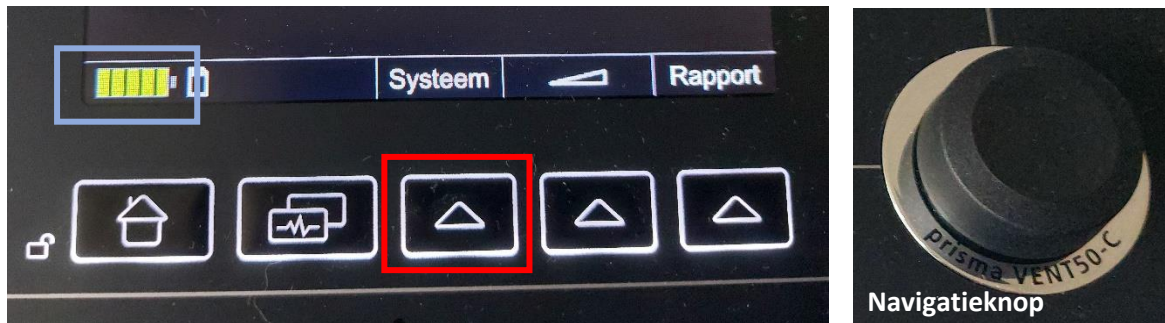

11. Slangentest

Bij gebruik van een ander masker, of als de beademing plotseling anders aanvoelt kunt u een slangentest doen:

1. Klik op de functieknop onder de tekst 'systeem' (foto boven, rood kader)
2. Draai met de navigatieknop (foto boven) naar 'slangensysteem' groen omkaderd is, druk op de navigatieknop om te bevestigen
3. Draai met de navigatieknop naar 'slangentest' en bevestig (navigatieknop indrukken)
4. Klik nogmaals op de navigatieknop om te bevestigen

12. Aansluiten van zuurstof op de Prismavent 50C

De zuurstofconnector bevindt zich aan de achterzijde van de machine.

Om een connector te kunnen plaatsen moet deze worden geopend.

- Duw het metalen plaatje van rechts naar links, u hoort een klikje als dit gelukt is
- Duw de achterkant van de zuurstofconnector, met het zwarte ringetje, in de aansluiting
- Duw door tot u een klikje hoort en het beugeltje naar beneden springt
- De connector zit vast, u kunt zuurstof aansluiten
- Als u een nieuwe connector nodig hebt kunt u contact zoeken met het CTB (010 7032875)



13. Afsluiten van zuurstof op de Prismavent 50C

Als u geen zuurstof gebruikt is het van belang de connector te verwijderen en de aansluiting af te sluiten om te voorkomen dat er ongefiltreerde lucht de beademingsmachine in wordt gezogen.

- Druk de metalen beugel aan de rechterkant van de aansluiting naar links.
- De witte connector schiet automatisch uit de aansluiting en kunt u verwijderen.
- U kunt het apparaat nu gebruiken zonder zuurstof.