

Symbolen

SYMBOL	BESCHRIJVING
	Thuismodus geactiveerd
	Lekcircuit geselecteerd
	Uitademingsklepcircuit geselecteerd
	iOxy aangesloten
	SpO ₂ aangesloten
	FiO ₂ aangesloten
	Meerdere pagina's
	Meer inhoud beschikbaar
	Hoge prioriteitsalarm in historielijst
	Gemiddeld hoge prioriteitsalarm in historielijst
	BATTERIJSTATUS
INTERN	CLICK-ON
	VOL
	Medium
	Laag
	Batterijen opladen.
	Ontkoppeld of storing
	Storing

Zuurstof gebruiken



- O₂ moet worden uitgezet wanneer de Vivo 50 niet in bedrijfsmodus is!
- Het wordt aangeraden de zuurstofconcentratie te controleren.
- Zuurstof mag niet meer zijn dan 15 l/min.

Vivo 50

Beknopte handleiding

Doc. 04998 NIB-1

- Sluit de zuurstofslang aan op de connector
- Sluit de zuurstofkabel aan.
U zult een klikgeluid horen wanneer de kabel goed vastgemaktdt is.

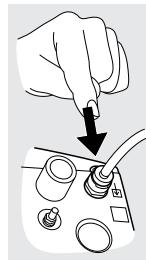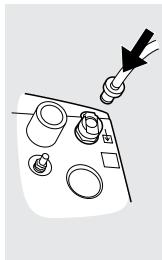


Loskoppelen:

- Druk op de ontgrendelknop om de zuurstofslang los te koppelen.
- Verwijder de slang.
- Schakel de zuurstofbron uit.

De connectoren gebruiken

Zorg ervoor dat de kleurmarkering naar boven gericht is.

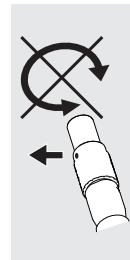

Trek aan de bus van de stekker en niet aan de kabel zelf om de stekker erauit te trekken.



NEDERLANDS

BREAS

A GE Healthcare Company
Breas Medical AB - Förortsgatan 1
SE-435 33 Mjölby - Sweden
Phone +46 31 86 88 00 - Fax +46 31 86 88 10
breas@breas.com - www.breas.com




Beknopte handleiding

Dit is geen complete handleiding voor de Vivo 50.
Raadpleeg voor complete instructies uw handleiding.



Druk op de knop Aan/Uit op het zijpaneel.

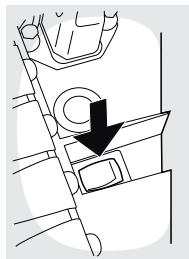

De behandeling starten/stoppen

- Start de behandeling door op de Start/Stop-knop op het voorpaneel te drukken.
- Houd de knop ingedrukt totdat de voortgangsbalk vol is.


- Stop de behandeling door op de Start/Stop-knop op het voorpaneel te drukken.
- Houd de knop ingedrukt totdat de voortgangsbalk vol is.

- Druk de Start/Stop-knop binnen 3 seconden weer in.

- Stop de behandeling door op de Start/Stop-knop op het voorpaneel te drukken.
- Houd de knop ingedrukt totdat de voortgangsbalk vol is.
- Druk de Start/Stop-knop binnen 3 seconden weer in.


Geheugenkaart

Steek de geheugenkaart in de sleuf voor de geheugenkaart aan de zijkant van de Vivo 50. Wanneer de kaart geplaatst is, zal het display automatisch naar de pagina "Apparaatgeheugen" gaan.

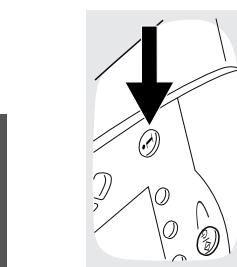

De click-on batterij bevestigen


- Gebruik een dun stokje om het deksel voor de click-on batterij connectoren te openen. Zorg ervoor dat het deksel volledig open staat.
- Plaats de Vivo 50 in de getoonde stand net boven de houders van de click-on batterij (gemarkeerd met cirkels).
- Kantel de Vivo 50 rechtop. U hoort in deze stand een klikgeluid.

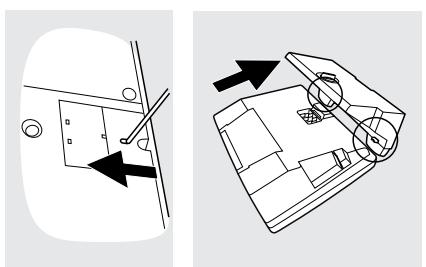

Het patiëntcircuit vervangen

Stop de behandeling alvorens het patiëntcircuit los te koppelen.

Een patiëntcircuit aansluiten:

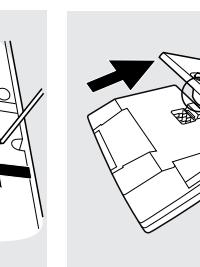


- Sluit het patiëntcircuit aan op de patiëntluchtauitlaat van de ventilator.
Sluit het andere uiteinde van het patiëntcircuit aan op de patiëntinterface.
- Zorg ervoor dat het circuitpictogram overeenkomt met het aangesloten circuittype.

Uitademingsklepcircuit:




De patiëntluchtinlaatfilters vervangen

- De patiëntluchtinlaatfilters zitten in het filterhuis aan de zijkant van de ventilator.
Afwasbare filter (grijs): Vervang het filter minstens eenmaal per jaar. Was het filter minstens eenmaal per week.
Wegwerpfilter (wit): Vervang het filter minstens om de 4 weken of vaker als het filter is gebruikt in een omgeving die zwaar is verontreinigd of veel stofmeel bevat.

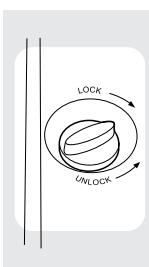

- i-Knop**
Gebruik de i-knop voor uitleg over de instellingen en alarmen.

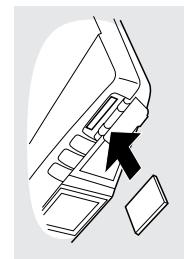


Korte handleiding Vivo 50 deel 2

Het apparaat aanzetten

1. Knop aan de zijkant van het apparaat een seconde indrukken.	
2. Het stand-by scherm verschijnt.	
3. Druk op de aan-/uit schakelaar onder het beeldscherm.	
4. Er verschijnt een balk in het scherm met de tekst: start beademing. De knop vasthouden tot de balk helemaal gevuld is. Er klinkt een piep.	

5. Als het apparaat niet is aangesloten op netstroom, druk dan op de knop onder OK (Let op: het apparaat heeft geen touch screen).

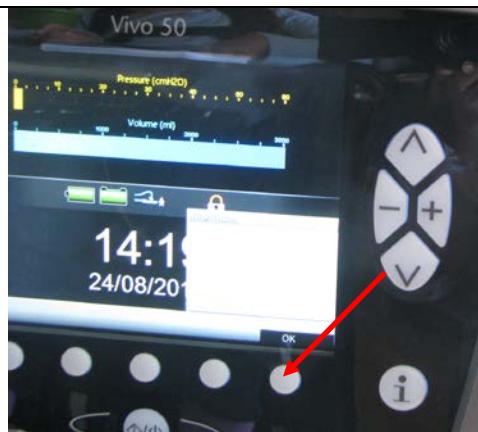

Het apparaat uitzetten

1. Druk op de aan-/uit schakelaar onder het beeldscherm.



2. Er verschijnt een balk in het scherm met de tekst: stop beademing. De knop vasthouden tot de balk helemaal gevuld is.



3. Daarna binnen 5 seconden **kort** bevestigen met de aan/uit knop aan de zijkant van het toestel.



4. Het stand-by scherm verschijnt.



5. Knop aan de zijkant van het apparaat een paar seconde indrukken.	
6. Het scherm wordt helemaal zwart (bij de stroombron blijft eventueel een klein lampje branden).	

Van profiel wisselen

1. Druk op knop onder het woord Setup. (Let op: het apparaat heeft geen touch screen.)	
2. Met de ▲toets naar het profiel gaan.	

3. Met de + en – toetsen het juiste profiel selecteren. Het profiel wordt groen.	
4. Bevestigen met ja onderaan het scherm.	

Onderhoud

1. **Dagelijks** de dikke beademingsslangen los uithangen en, bij gebruik van een bevochtiger, het vochtopvangpotje leegmaken en laten drogen.
2. **Wekelijks** tussenstukjes, eventuele verbindingsslang en het beademingsmasker reinigen in een huishoudelijk sopje (afwasmiddel), naspoelen en goed drogen.
3. **Wekelijks** trolley en buitenzijde beademingsmachine schoonmaken met een vochtige doek.
4. **Zo nodig** de beademingsslangen bij zichtbare verontreiniging omwisselen voor een schoon systeem. Het verontreinigde systeem wordt huishoudelijk schoongemaakt.
5. **Per kwartaal** de gehele beademingsslang vervangen.

Uitzetten van apparaat

Als de machine geheel is uitgezet (knop aan de zijkant van de machine), na transport en dergelijke vraagt de machine om een nieuwe kalibratietest, volg de instructies op de display.


Na opbouw van een nieuw slangensysteem wordt ook de machine opnieuw gekalibreerd. Bij het uitvoeren van de kalibratie het gehele slangensysteem plus de accessoires tot aan de canule c.q. het masker in het kalibratieprogramma opnemen.

Stroomvoorziening

Controleer altijd of de machine en de accu (indien aanwezig) zijn aangesloten op het lichtnet (220V) door na te gaan of het controlelampje van de netspanning brandt en controleer of de externe accu op de machine is aangesloten.




De machine is aangesloten op het lichtnet

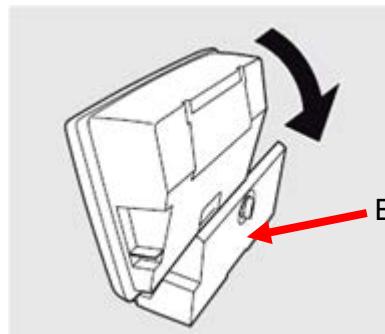


Externe accu

- Bij een stroomonderbreking gaat de machine over op de accufunctie, druk op OK om dit te bevestigen. Als later de lichtnetfunctie is hersteld wordt ook gevraagd dit te bevestigen met OK.

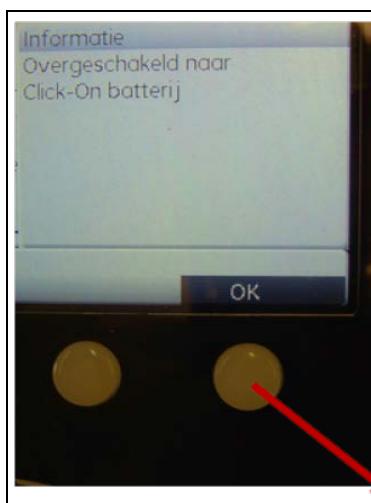

Bevestigen met OK

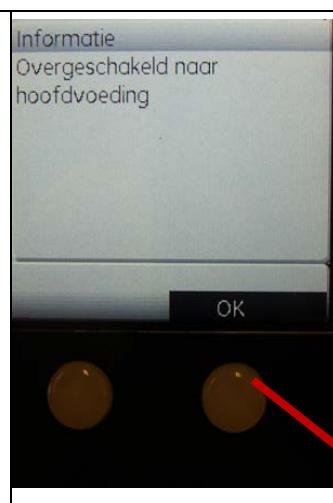

Bevestigen met OK