


Informatie Atmos C 161 uitzuigapparaat

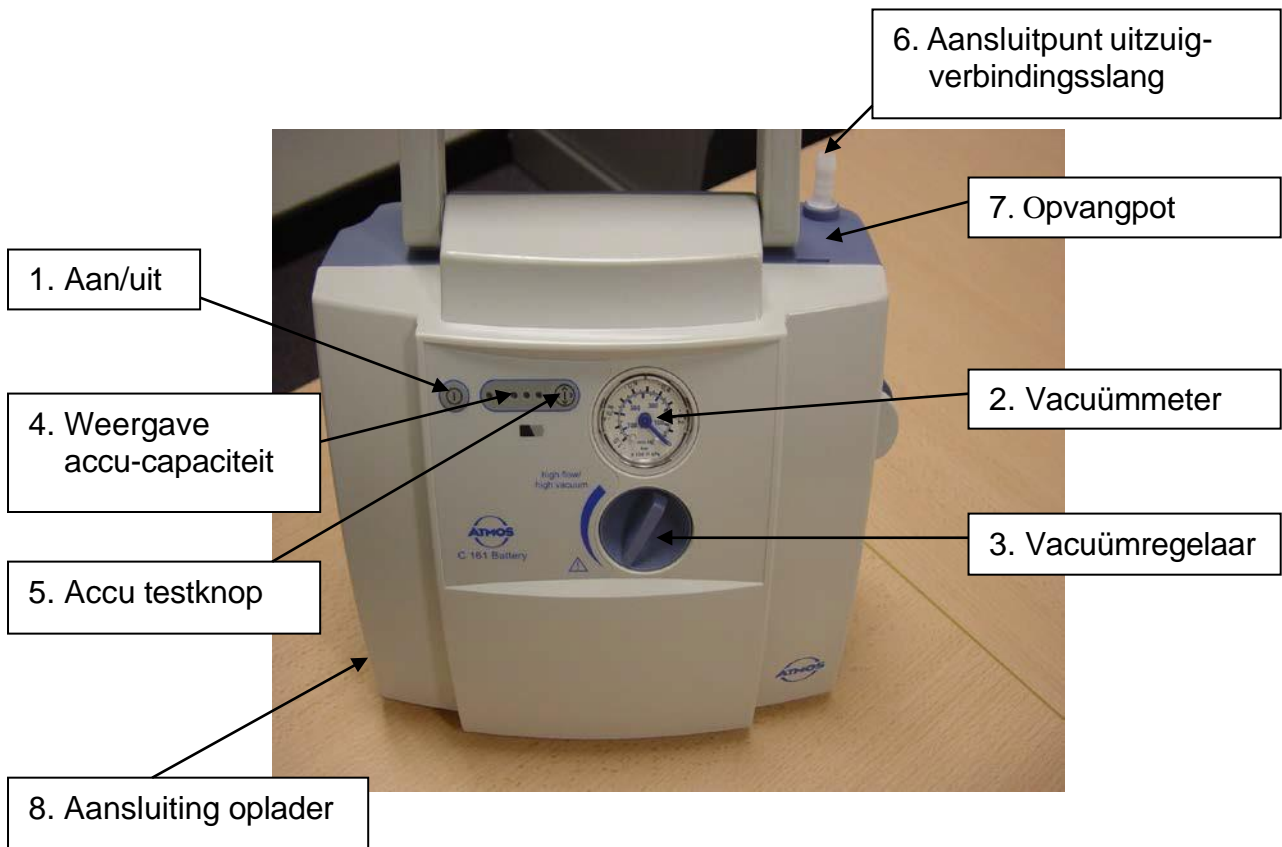

De Atmos C 161 is een handzaam mobiel uitzuigapparaat voor het wegzuigen van slijm en sputum uit de bovenste luchtwegen. Bij aanzetten van het apparaat wordt een vacuüm opgebouwd waardoor het slijm kan worden afgezogen. Het afgezogen slijm wordt opgevangen in de bijgeleverde opvangpot. De Atmos C 161 is licht en compact en in een bijgeleverde schoudertas mee te nemen.

Werking

De Atmos C 161 kan aangesloten worden op een lichtnet aansluiting (220V), maar kan ook mobiel gebruikt worden. Het apparaat beschikt over een 12V accu. De interne accu wordt met behulp van de bijgeleverde oplader opgeladen (8). Met de accu testknop (5) kan de accuspanning worden gecontroleerd. Bij voldoende accuspanning branden de groene controlelampjes(4).


In gebruik nemen

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet de accu worden opgeladen. Door indrukken van de aan/uit knop (1) wordt het uitzuigapparaat aan- en uitgeschakeld.

Met behulp van een vacuüm regelknop (3) kan het gewenste vacuüm worden ingesteld. Stel deze in op 40-60 mmHg voor volwassenen, voor kinderen op 20-40 mmHg.

Dit apparaat kan onafhankelijk van netvoeding functioneren op een interne accu. Met behulp van de bijgeleverde oplader kan de accu worden opgeladen. De bijgeleverde oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van deze ingebouwde accu. Als de accu leeg is duurt het ongeveer 1-2 uur voor dat het opladen gereed is. De groene acculampjes geven een indicatie voor accuvermogen aan (elk brandend lampje geeft 20% vermogen aan). Tijdens het opladen kan er wel gezogen worden. Het apparaat is met behulp van een aansluitkabel ook op een 12 volts (sigarettenaansteker) in de auto te gebruiken. De interne accu van het uitzuigapparaat kan op deze wijze niet worden opgeladen.

De opvangpot (transparant blauw aan de achterzijde) van het apparaat is op eenvoudige wijze door horizontaal naar achterschuiven los te koppelen, zodat deze na verwijderen van het deksel leeg gemaakt kan worden.

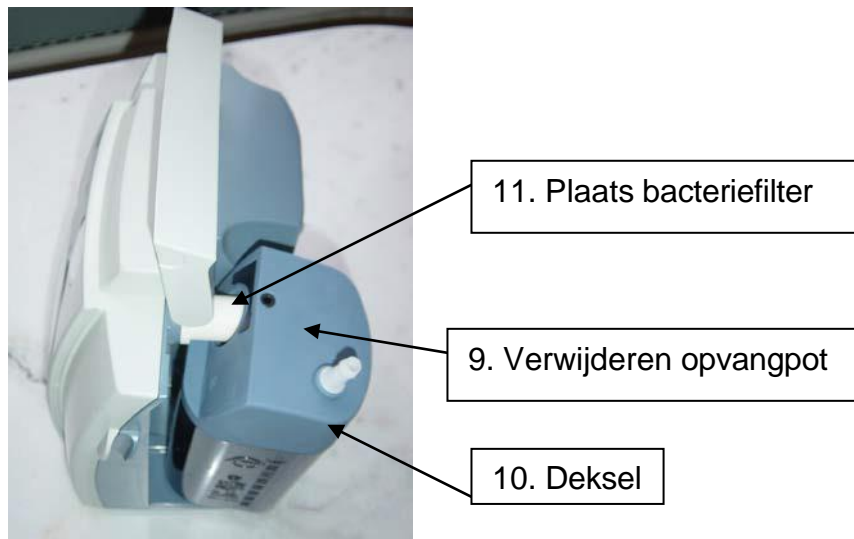

Bediening

- Zet het apparaat aan met aan/uit schakelaar (1).
- Sluit de verbindingsslang aan op de hiervoor bestemde aansluitpoort (6).
- Sluit de vingertip af en controleer de ingestelde vacuümdrukopbouw op de vacuümmeter (2).
- Gebruik elke keer een nieuwe steriele uitzuigkatheter.
- Spoel de verbindingsslang na gebruik door met schoon water vanuit het doorspoelpotje.
- Zorg ervoor dat de opvangpot (7) nooit te vol is, indien half vol → legen.

Vervangen van het filter

De Atmos C 161 werkt alleen als de bijgeleverde bacteriefilter is geplaatst. De overloopbeveiliging en dit filter voorkomen dat slijm en water in het binnenste van het apparaat terechtkomt.

Indien het zuigvermogen van de pomp terugloopt, is het aan te raden om het witte filter te wisselen. Als het filter vochtig is geworden dient het eveneens verwisseld te worden. Bij het verwisselen van het filter worden disposable handschoenen gebruikt.



Atmos bacteriefilter

Reinigen en onderhoud

De verbindingsslang wordt eenmaal per week gewisseld. Nadat de opvangflacon is leeggegoten kan deze in een milde zeepoplossing worden gereinigd. Het apparaat zelf kan met een vochtige doek worden schoongemaakt.

Service en reparatie

Eenmaal per jaar wordt het apparaat technisch nagekeken en gecontroleerd door de onderhoudsfirma.