


INSTRUCTIEKAART



RESPIRONICS A - 40

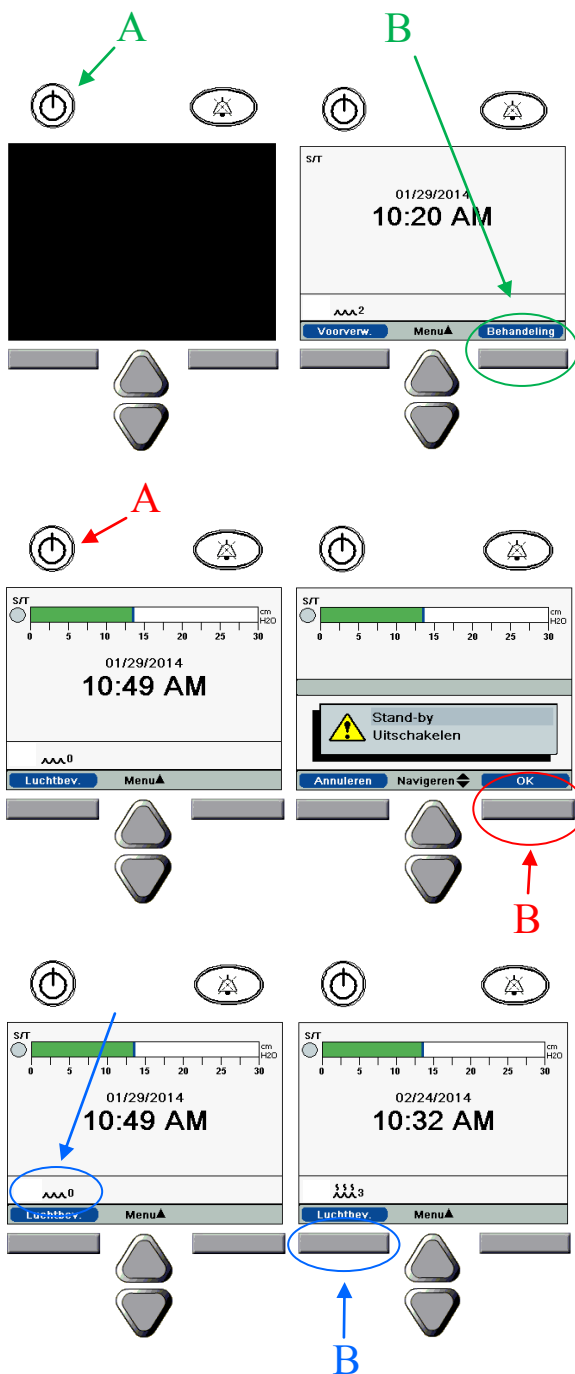

Starten beademing

Voordat u gaat starten met de beademing dient u te zorgen dat :

- De watertank gevuld is (indien deze gebruikt wordt),
- De beademingslang aangesloten is.

Starten beademing:

Normaliter ziet u een zwart scherm, door op knop (A) te drukken zal het hiernaast afgebeeld opstartscherm weer gegeven worden.

Om de beademing te starten drukt u op knop (B).

Stoppen beademing

Stoppen beademing:

Druk op knop (A) in de bedrijfsmodus, vervolgens krijgt u het hiernaast afgebeelde scherm. Door op knop (B) te drukken zal het apparaat in de Stand-By modus gaan.

Koppel uw beademingslang af en laat deze drogen. Maak uw bevochtigingspot leeg en laat deze idem drogen.

Luchtbevochtiging


Indien u de luchtbevochtigingsmodule aansluit aan het beademingsapparaat, verschijnt het hiernaast getoonde icoon in het display.

Middels Knop (B) zijn er 5 standen instelbaar van 0-5. Op stand 0 staat de bevochtiger uit en op stand 5 staat de bevochtiger op de hoogste stand.

Indien u doorgaans in het geheel geen bevochtiger gebruikt, kunt u de bevochtigingsmodule afkoppelen en uw beademingslang rechtstreeks op het beademingsapp. aansluiten.


Enkel afgekookt en afgekoeld kraanwater, of gedemineraliseerd water gebruiken !!!

RESPIRONICS A - 4 0

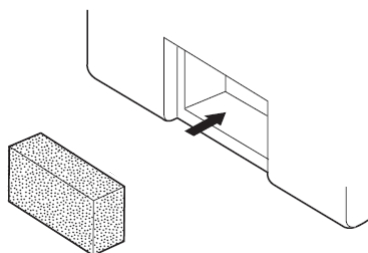

- Technische storingen dient u direct te melden bij de firma. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar:

VIVISOL: 013-5231023

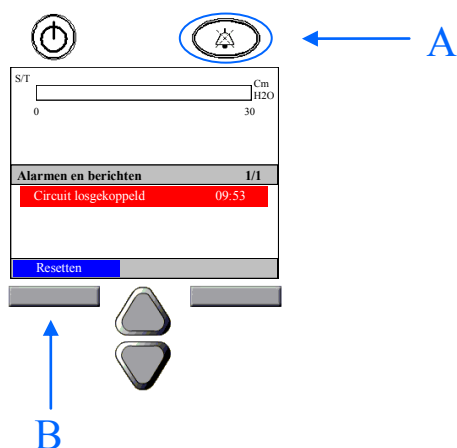

Onderhoud

Dagelijks:

- Waterreservoir reinigen en beademingslang “luchten” .

Wekelijks:

- Reinig het luchtfilter door de ze uit te spoelen en droog terug te plaatsen.

Maandelijks:

- Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek. Gebruik een mild reinigingsmiddel.

Halfjaarlijks:

- Vervang het grijze luchtfilter (*zie hiernaast*).
- Vervang de beademingslang.

Alarmeren

In nagenoeg alle gevallen zal op uw apparaat enkel één alarm zijn ingesteld en wel ; **“Circuit losgekoppeld”**.

De reden hiervan is:

- De slang is losgeschoten.
- Het masker zit te los en lekt te veel lucht.

Het hiernaast getoonde scherm zal oplichten en tevens zal de alarmresetknop (A), rood gaan “flikkeren”.

Door op knop (A) te drukken zal het akoestische alarm 2 minuten onderdrukt worden. De melding zal in het scherm blijven staan.

Door op knop (B) te drukken zal de alarmmelding verdwijnen uit het scherm. U dient echter wel de oorzaak te verhelpen anders zal de alarmmelding zich herhalen