

INSTRUCTIEKAART


COUGH ASSIST E - 70

Voorpaneel




1. Instellingen: dit is een menu waarin u (indien ingesteld door de behandelaar) kunt kiezen uit max. drie voor ingestelde modi.
2. Menu knoppen: hiermee kunnen enkele menuopties opgeroepen worden. De INSTELLINGEN zijn hierin niet te wijzigen.
3. Start "BEHANDELING" (nadat u op knop 4 gedrukt hebt).
4. AAN/UIT, STAND-BY knop.
5. Schakelaar voor handmatige bediening: Schakelaar naar Rechts (+), inademing wordt geactiveerd. Schakelaar naar Links (-), uitademing wordt geactiveerd. Schakelaar in het midden, pauzetijd wordt geactiveerd.
Deze functie is UITGESCHAKELD als de modus op "automatisch" is ingesteld!

Patientencircuit

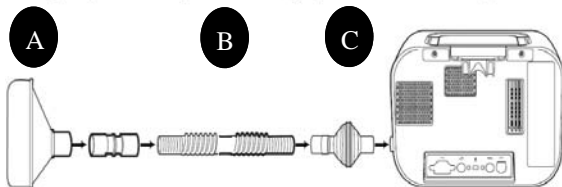

- A. Masker (in uitzonderlijke gevallen kan de E-70 ook op een tracheacanule gebruikt worden).
- B. Flexibele slang.
- C. Bacteriefilter.

Voorgeschreven Modi

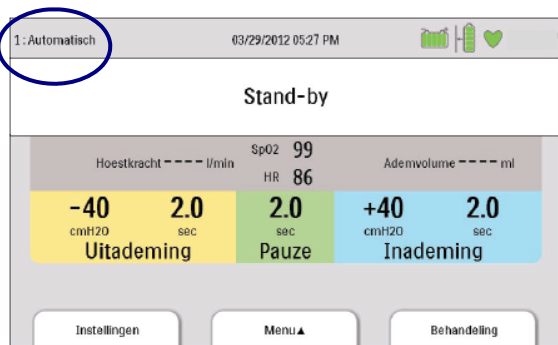

1. **Handmatig:** U kunt met schakelaar (5) zelf de therapie bepalen. Het apparaat dient de ingestelde inademsdruk toe gedurende de tijd dat de schakelaar in de inademsstand wordt gehouden. Dit geldt idem voor de uitademsdruk in de uitademsstand. Staat de schakelaar in het midden dan gebeurt er niets (pauzetijd).
2. **Automatisch:** De in- en uitademsdruk, de in- en uitademingstijd en de pauzetijd zijn vooraf voor u ingesteld. De behandeling start in de pauzetijd en zal volledig automatisch verlopen. In het display zal links boven "1: automatisch" getoond worden.


COUGH ASSIST E - 70

Behandelingsfuncties

Het apparaat levert de volgende behandelingsfuncties, mits deze zijn voorgeschreven en ingesteld:

1. **Cough-Trak:** De patient kan zelf aangeven wanneer de cyclus start. Deze functie draagt bij aan de synchronisatie en het comfort. Deze functie is alleen beschikbaar in de automatisch modus. Daar de patient zelf mag "triggeren" is de pauzetijd in deze functie NIET ingeschakeld.
2. **Oscillatie:** oftewel hoogfrequente trillingen. Deze functie kan ingeschakeld worden in zowel de in- als uitademingsfase of beide. Oscillatiebehandeling versterkt de mobilisatie van sputum en verbetert de bronchiale drainage.

(de rode curve laat de cyclus zien zonder oscillatie. De blauwe laat de cyclus zien met oscillatie, in dit geval zowel de in- als de uitademing)

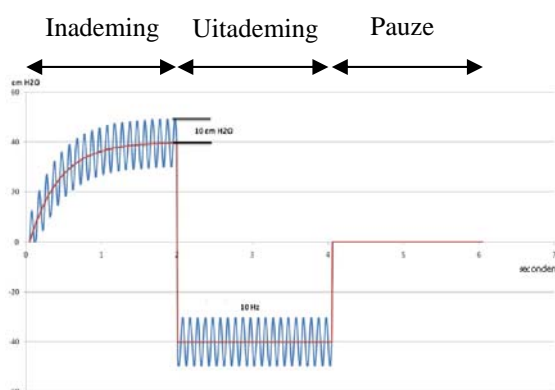

Onderhoud

Reinigen:

U dient het buitenoppervlak regelmatig te reinigen met een zachte doek met een van de volgende reinigingsmiddelen: 70% alcohol oplossing of een mild reinigingsmiddel.

GEEN schuurspons of andere agressieve artikelen gebruiken daar het display anders ernstig beschadigt wordt!

Luchtfilter: Bij normaal gebruik dient u het luchtfilter eenmaal in de twee weken schoon te maken (*wassen met mild reinigingsmiddel, uitspoelen en droog terugplaatsen*). Zie hiernaast.

Eenmaal per 6 maanden dient het filter vervangen te worden.

Patientencircuit: Masker en slangen dienen regelmatig (minimaal 1 x per week) schoongemaakt te worden met een mild reinigingsmiddel. Daarna grondig spoelen. De onderdelen dienen volledig droog te zijn voordat ze weer gebruikt worden.

Bacteriefilter: het filter dat het apparaat beschermt tegen vanaf de patient meegevoerd materiaal (bv sputum), kan blijven zitten zolang het niet verstopt is of zichtbaar verontreinigt is. Probeer het filter niet te wassen.

Preventief onderhoud: Het apparaat heeft technisch gezien geen routineonderhoud nodig. Indien het apparaat desondanks toch mankementen vertoont dient u contact op te nemen met het CTBM.

