



INSTRUCTIEKAART

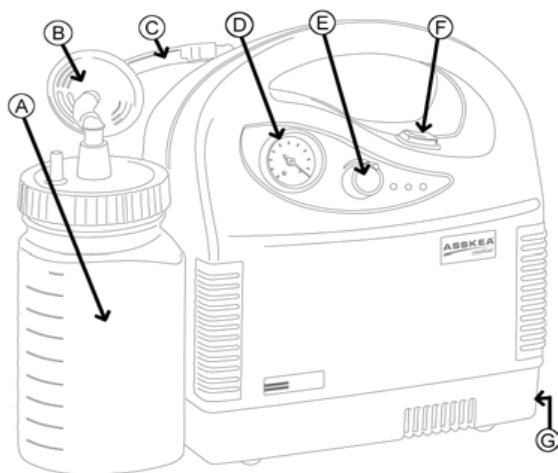

Beschrijving/bediening


- (A) Opvangreservoir
- (B) Bacteriefilter
- (C) Siliconen slang
- (D) Vacuümmeter
- (E) Vacuümregelknop
- (F) AAN/UIT knop
- (G) Netaansluiting (220V)

Aansluiten opvangreservoir

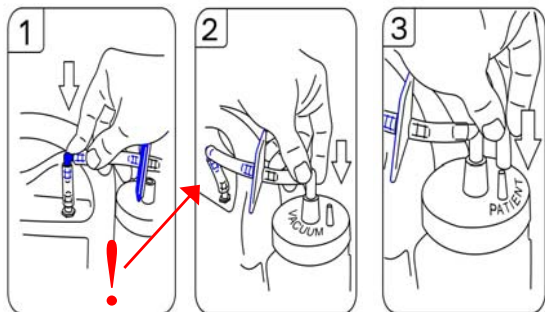






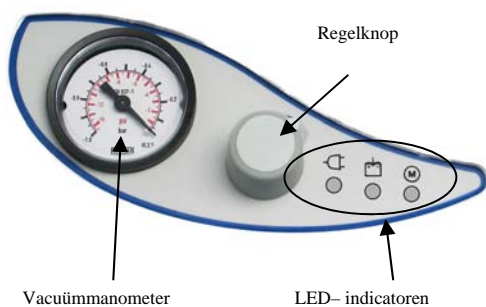




- Afb.1: Verbindings slang met het blauwe haakse koppelstuk op de pomp aansluiten. Let hierbij op dat blauwe deel van het filter naar de pomp "wijst".
- Afb. 2: Witte haakse koppelstuk in opening in het midden van het deksel duwen met opschrift "VACUUM".
- Afb. 3: Uitzuigverbindingsslang op nippel drukken met opschrift "PATIENT".

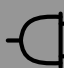Regelunit (LED-indicatoren)




Vacuümmeter

LED- indicatoren

	Permanent 	Oplaadapparaat (lichtnetadapter) of autoaccu is aangesloten. Voedingsspanning is aanwezig.
	Knippert 	Indien pomp ingeschakeld is in combinatie met aangesloten lichtnetadapter, of dat looptijd van 2 minuten overschreden is
	Knippert 	<i>Knippert af en toe groen: accu voor 90% opgeladen!</i>
	Permanent 	Accu wordt opgeladen
	Knippert 	Accu meer dan 50% leeg , indien mogelijk opladen met adapter.
	Permanent 	Defecte accu
	Permanent 	Motor is ingeschakeld.


ASSKEA DC30

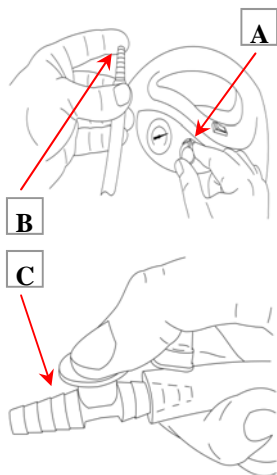

Regelunit (ingebruikname)

- Pomp aansluiten op *geaarde* netvoeding. (of middels kabel op sigaretten-aansteker in auto).
- Schakel de hoofdschakelaar in, groene controle lampje (in schakelaar) moet branden en led moet groen oplichten.
- Stel met regelknop (A) het gewenste maximale vacuum in terwijl u met uw vinger (B) de zuigslang afsluit.
- Kies afhankelijk van gebruik (*eventueel overleg CTbM*) de juiste maat uit-zuigcatheter en verbind deze middels een “vingertip” (C) of koppelstuk met de zuigslang.
- Indien een uitzuigcatheter met een beluchtingsopening wordt gebruikt kunt u deze rechtstreeks aansluiten op de zuigslang.

Na gebruik

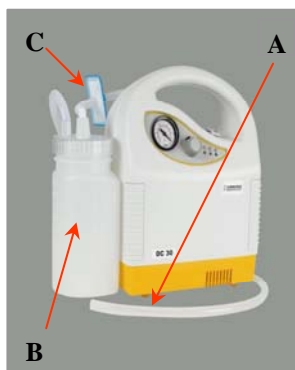

- Zuigslang goed naspoelen (A) met water. Opvangreservoir *niet meer dan 3/4* vullen!!
- Opvangpot (B) loskoppelen (omhoogschuiven) van de asskea nadat u zowel de zuigslang als de verbindingsslang losgekoppeld heeft van het deksel. Deksel eraf schroeven en pot ledigen. Schoonmaken en goed spoelen totdat alle secretieresten verwijderd zijn.
- *Voorkom dat het filter (C) nat wordt* door de Asskea scheef te houden tijdens uitzuigen (of indien de Asskea niet in gebruik is en zich er al vloeistof/secretie bevindt in opvangpot) Filter zal hierdoor verzadigd/verstopt raken m.a.g. afname van zuigkracht.
- Sluit de Asskea altijd aan op een stroomvoorziening (220V of 12 V).

Storingen

Storing	LED indicatie	Mogelijke oorzaak	
Pomp start niet	Permanent groen Permanent groen Permanent groen	Lege accu. Filter is vochtig/dicht.	Oplaadadapter aansluiten. Bacteriefilter vervangen.
Geringe zuigkracht	Knippert rood	Accu bijna ontladen. Lekkage in systeem. Vuil bacteriefilter.	Accu opladen/ asskea aansluiten netstroom. Controleer systeem/slangen/verbindingen op lekkage. Controle filter/vervangen.
Geen zuigkracht		Zuigslang verstopt Bacteriefilter verzadigd Overloopbeveiliging van deksel sluit opening af	Vervang de zuigslang. Bacteriefilter vervangen, controleer of slangen goed zijn aangesloten. Controleer of opvangreservoir niet vol is, reservoir ledigen.