

INSTRUCTIEKAART

MEDELA BASIC 30




Medela Basic 30

U bent voorzien van een Medela uitzuigunit. Deze unit beschikt Niet over een interne accu maar werkt alleen op 220 volt.. De medela dient dus altijd aangesloten te zijn op de netvoeding.

In de regel zult u naast de Medela , ook voorzien zijn van een mobiele uitzuigunit.

De medela dient op een stabiele plaats gezet te worden. Indien u voorzien bent van een beademingstrolley kunt u hem op de onderste plank plaatsen.

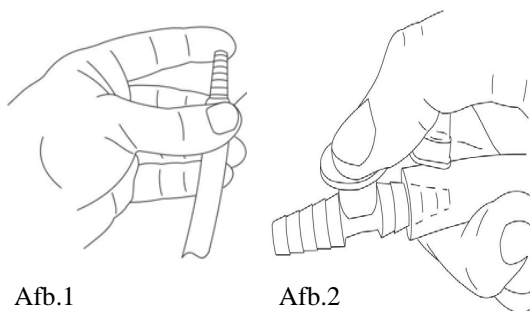

Afb.1


Afb.2

Werking/ instelling

- AAN/UIT knop (B) indrukken
- Hou met duim de uitzuigslang **DICHT!** Zie afb. 1 en/of 2
- Kijk op Mano meter (A) en lees druk af. Voor een goede werking dient de druk tussen 40 en 60 cm H₂O te zijn ingesteld.
- Indien de druk hoger dan 60 of lager dan 40 is kunt u deze bijstellen met stelschroef (C).
- De Medala is nu gebruiksklaar.
- Sluit nu de uitzuigcatheter aan op de verbindingsslang.
- Na de uitzuigprocedure, de uitzuigcatheter weggooien!



MEDELA BASIC 30

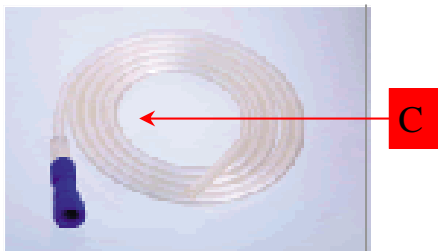

Onderhoud

- Indien u de Medela gebruikt heeft dient u de uitzuigslang (C) grondig na te spoelen met schoon water. Deze slang dient iedere twee weken i.v.m. hygiëne vernieuwd te worden.
- Tijdens gebruik van de Medela zal al het sereet zich verzamelen in opvangpot (A). U dient dagelijks (indien gebruikt), de pot te ledigen en huishoudelijk schoon te maken.
- Deze pot mag niet meer dan 3/4 gevuld zijn!!
- Opvangpot (B) is een overloopbeveiliging. De klep in deze pot zal (indien pot A overloopt)dichtslaan ter bescherming van het apparaat.
- De Medela is in principe onderhoudsvrij. Wekelijks de pompkast met een vochtige doek reinigen is voldoende. Jaarlijks wordt een technische controle uitgevoerd door de leverancier.

Storingen

Indien er zich een storing voordoet aan het apparaat dient u contact op te nemen met het CTbM. Wij zullen uw storing dan verder afhandelen met de leverancier. De leverancier zal u diezelfde dag voorzien van een vervangend toestel of het toestel ter plaatste repareren .