

Verschoonlijst materiaal CTB

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Beademingslang en toebehoren	Beademingslang	z.n.	1x 6 maanden
	Beademingslang verwarmd, (S9, Hybernite, MR 810, Hytrel, Prismavent)	z.n. doorspoelen	Slang 1x 6 maanden Hybernite volledige set (1x per jaar)
	F&P RT 102 150 cm verwarmd	Niet schoonmaken	1x 4 maanden
	Beademingslang met expiratieklep	Niet schoonmaken	1x 4 maanden
	Losse connector met drukslang Elisée 150 of PLV-100, kortsluiting Trilogy	Niet schoonmaken	1x 12 maanden
	Overige losse connectoren	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	Indien defect of niet meer schoon te maken
	Whisper Swivel	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	1x 12 maanden
	Zuurstof tussenstuk	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	Indien defect of niet meer schoon te maken
	Harmonicasslang/verbindingsslang (+ swivel), mount catheter	Bij visuele verontreiniging	1x maand of bij defect
	Bevochtigingspot-kamer	Dagelijks legen en laten drogen. 1x week reinigen, z.n. met schoonmaakazijn	Disposable: tegelijk met beademingslangen Reusable: alleen indien defect
	Bevochtigingskamer MR290 (flotter)	niet	1x maand
	HME (=bevochtigingsfilter) beademingsmachine	Niet	Dagelijks
	Filter beademing (bij verneveling)	Niet schoonmaken	Dagelijks
	Spiro Fogless	Zo nodig huishoudelijk	Filter iedere dag
	T-stuk verneveling	Na ieder gebruik huishoudelijk	Indien defect of niet meer schoon te maken

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Maskers	Beademingsmasker	Dagelijks masker inzet huishoudelijk reinigen	Max 2x jaar, vaker alleen in overleg met CTB
	Mondstuk los	Dagelijks huishoudelijk reinigen	1x maand
	Kinband/hoofdband	Handwas	Indien defect

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Filters beademingsapparaten	Nippy Clearway hoestmachine	Grijs filter 1x per week uitkloppen-spoelen	Grijs filter bij defect Wit filter 1x p/maand
	Vivo 40 en Vivo 50	Grijs foam filter 1x p week uitkloppen-spoelen	Wit filter 1x p/maand Grijs Foam filter 1x per jaar
	Trilogy Evo	Lucht filter 1x per maand uitkloppen	Grijze filter 1x 6 maanden Witte filter 1 x maand
	Trilogy 100	1x p 2 weken uitkloppen-spoelen	1x jaar tijdens onderhoud.
	Stellar/ Astral	niet	Tegelijk met de beamingsslang
	Philips A40	Grijs Foam filter: 1xp 2 weken uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden
	Weinmann	Grof filter: 1x p/week uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden Fijn filter vervangen na 1000 gebruiksuren
	Respironics ASV / Dreamstation	Grijs Foam filter: f p 2weken uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden
	ResMed Aircurve 10	Niet	1x 6 maanden
	ResMed Autoset CS2	Niet	1x 6 maanden
	ResMed S9	Niet	1x 6 maanden
	ResMed Lumis 150	Niet	1x 6 maanden
	Luisa	Luchtfilter 1x per maand uitkloppen en spoelen	Indien in gebruik: Wit filter 1x p/maand Grijs Foam filter 1x per jaar
	Prisma Vent50-C	Luchtfilter 1x per maand uitkloppen en spoelen	Indien in gebruik: Wit filter 1x p/maand Grijs Foam filter 1x per jaar

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Uitzuig materiaal	Serres zak uitzuigapparaat	Niet	Bij ¼ vol, minimaal 1x week
	Afzuigverbindingsslang	Na ieder gebruik doorspoelen met kraanwater	1x week
	Yankauer	Na ieder gebruik doorspoelen met kraanwater	3x week
	Filters uitzuigapparatuur	Niet	1x 6 maanden of bij niet goed functioneren
	Uitzuigpot zonder opvangzak	Dagelijks legen en reinigen	

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Hoest ondersteuning	Slangen hoestmachine	Bij visuele verontreiniging of 1x per 2 weken	1x 6 maanden
	Masker hoestmachine	Na elk gebruik met warm water	Indien defect
	Bacteriefilter hoestmachine	Niet	1x maand of bij visuele verontreiniging
	Machine filter hoestmachine	1x 2 weken uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden

	Airstackballon	Zo nodig uitwendig	Indien defect, max 1x/jaar
	Airstackslang plus mondstuk Airstack masker	Dagelijks reinigen	Indien defect, max 3x/jaar Indien defect,
	Handbeademingsballon	Zo nodig uitwendig	Indien defect, max 1x per jaar

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Tracheacanule en toebehoren	Canule zonder cuff	Schoonmaken	1x 28 dagen
	Canule met cuff	Niet	1x 28 dagen
	Binnencanule	Minimaal 2x daags reinigen	1x 28 dagen
	Bivona canule, zonder binnencanule	Max 10x reinigen in gekookt water, pediatrisch 5x	1x 28 dagen
	Custom Made canules	In overleg met eigen CTB	
	Zilveren canule	Binnencanule 2x daags reinigen, Buitencanule 1x week reinigen	Alleen bij beschadiging
	Kunstneus/ bevochtigingsfilter op canule	Niet	Dagelijks
	Spreekklep in beademing	Zo nodig huishoudelijk	1x maand
	Spreekklep op canule	Zo nodig huishoudelijk	Bij defect vervangen
	Tracheacanulebandjes	Niet	Dagelijks
	Trachguard	Zo nodig huishoudelijk	Bij disfunctioneren of 1x maand

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Saturatie- meter	Saturatiemeterbandje	niet	Alleen bij defect
	Pleister saturatiemeterbandje	niet	Dagelijks

Algemene opmerkingen

Huishoudelijk schoonmaken houdt in: bij voorkeur met afwasmiddel, goed afspoelen en goed laten drogen.

Beademingsset Invasief: Na luchtweginfectie **met** antibioticakuur en/of ziekenhuisopname langer dan 24 uur, altijd complete beademingsset verschonen.

Beademingsset Non-invasief: Na luchtweginfectie **met** antibioticakuur beademingsset en masker vervangen.

Beademingsmachine: wekelijks de buitenzijde schoonmaken met een vochtige doek.

Trolley: wekelijks schoonmaken met een vochtige doek.

Bij defect of disfunctioneren: vervang de complete beademingsset