

Gebruiksaanwijzing hoestmachine Philips E70



Knop voor handmatige bediening.
Deze is meestal uitgeschakeld

Aan/uit knop

Knop om behandeling te starten

menu waarin u (indien ingesteld door de behandelaar) kunt kiezen uit max. drie vooraf ingestelde modi.

hiermee kunnen enkele menuopties opgeroepen worden. De instellingen zijn hierin niet te wijzigen.

Aansluiten van de Slang



Aansluitpunt filter/slang



Sluit altijd eerst het filter aan op het aansluitpunt, gevolgd door de bijgeleverde slang.



Slangenset bij gebruik met masker




Slangenset bij gebruik op canule

Starten behandeling

1. Zet de machine aan met de aan/uit knop
2. Sluit, indien voorgeschreven, de saturatiemeter aan
3. Zet de hoestmachine aan en controleer of de machine positieve en negatieve druk opbouwt
4. Plaats het masker van de hoestmachine op het gezicht of plaats de slang op de tracheacanule
5. en druk op knop om behandeling te starten.
6. Laat het mondneusmasker van de hoestmachine op het gezicht/ slang op canule staan gedurende vijf hoestcycli (één cyclus bestaat uit een insufflatie, exsufflatie en pauze). Vijf cycli vormen één sessie.
7. Vijf van deze sessies vormen één behandeling
8. (tenzij anders is voorgeschreven), de zorgverlener telt
9. Beëindig elke sessie met een inblaas
10. Neem het mondneusmasker/slang van de hoestmachine weg.
11. Pas, indien voorgeschreven, compressie toe tijdens elke uitzuigfase
12. Zet de hoestmachine uit
13. Verwijder het opgehoeste slijm - indien aanwezig - uit het mondneusmasker/slang en maak eventueel de slang schoon

Onderhoud

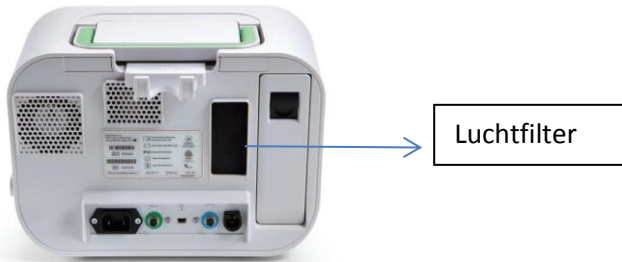

Buitenoppervlak kunt u met mild reinigingsmiddel 1x per week schoonmaken.

Het luchtfilter dient eenmaal in de twee weken schoongemaakt te worden. (wassen met mild reinigingsmiddel, uitspoelen en droog terugplaatsen).

Eenmaal per 6 maanden dient het filter vervangen te worden

Patientencircuit: Masker en slangen dienen regelmatig (minimaal 1 x per week) schoongemaakt te worden met een mild reinigingsmiddel. Daarna grondig spoelen. De onderdelen dienen volledig droog te zijn voordat ze weer gebruikt worden.

Bacteriefilter: het filter dat het apparaat beschermt tegen vanaf de patiënt meegevoerd materiaal (bv sputum), hoeft niet vervangen tenzij het verstopt is of zichtbaar verontreinigd is. Probeer het filter niet te wassen.

