

Transcutane CO2 meting met de SenTec Digital Monitoring System.




Verwisselen Sensormembraan

Onder normale omstandigheden moet het membraan van de V-Sign™ Sensor om de 28 dagen worden vernieuwd door de medisch technicus. De monitor controleert het membraan automatisch en geeft aan wanneer een wisseling nodig is. Op het beeldscherm wordt dit ook aangegeven. Als de wisseling in het weekend valt geef dit dan tijdig door aan de medisch technicus.

De membraan tijd klok wordt alleen teruggezet, als het vernieuwen van het membraan correct gedaan wordt en de monitor dit ook als dusdanig herkent en bevestigt.


Het verwisselen:

1. Maak de sensor schoon met alcohol 70% voor het verwisselen van de membraan.
2. Plaats de membraanwisselaar (V-Sign™ Disposable Membraan wisselaar op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafel. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is en dat er genoeg ruimte is.
3. Plaats de schone sensor met het lampje naar boven (de membraanzijde) zorgvuldig in de membraanwisselaar (afbeelding a).

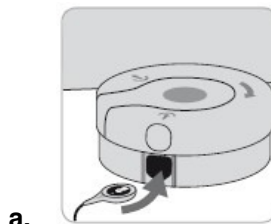


a.

4. Druk de wisselaar krachtig in met de handpalm. Zorg ervoor dat de wisselaar rondom goed is ingedrukt. Houdt de wisselaar 3 seconden ingedrukt. (afbeelding b).

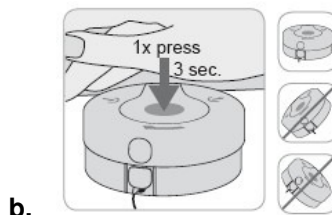

b.

5. pak de membraanset op. houd hem met een hand horizontaal vast aan het onderste gedeelte, terwijl u met uw andere hand het bovenste gedeelte rechtsom tot de volgende aanslag draait. Houd tijdens het draaien de sensor niet vast, want dan zou deze in de membraanset kunnen verschuiven. (afbeelding c).

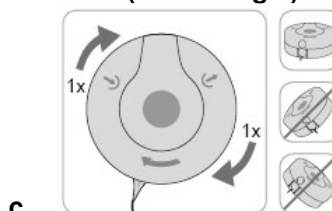


c.

6. Herhaal punt 4 en 5 VIER keer.


Verwijderen van de sensor:

Druk nog 1 keer op de sensor of til hem iets op om hem los te maken en verwijder de sensor uit de membraanset.

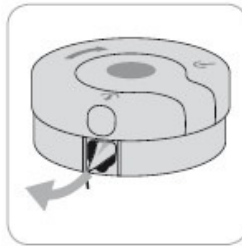

Controleren van het sensormembraan

1. Controleer elke keer na het aanbrengen of het sensormembraan op de juiste manier op de sensor zit.
2. Controleer of er zich geen luchtballen bevinden tussen het membraan en het sensoroppervlak.
3. Mocht het membraan loszitten of luchtballen bevatten dan dient u alle bovengenoemde stappen te herhalen

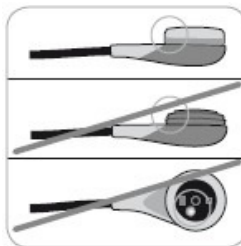





Wanneer het membraan tussentijds vervangen dient te worden kan het menu membraanvervangning geactiveerd worden. Dit kan wanneer de deur van het dockingstation open is.

Reset dagteller

Opmerking: Het menupunt “membraanwisseling” is alleen actief als de sensor niet in het docking station zit en niet aan de patiënt bevestigd is.

Na het verwisselen van het membraan moet de dagteller gereset worden om de dagteller op 28 dagen te zetten.

1. Kies het menu “membraanwisseling” door 3x  te drukken.
2. Activeer de keuze door  te drukken.
3. Kies het menu “bespanning gedaan” door 1x  te drukken.
4. Activeer de keuze door  te drukken. Hiermee is bevestigd dat de wisseling van het membraan is uitgevoerd.