

DOC NO	248565
PAGE	1 of 9
REV	1

SPECIFICATION – PRINTED MATERIALS

Rev	Change Note	Date document drafted	Document prepared by (Name)	Document Checked by (Name)
1	C29674	21 Oct 11	Alexander Modispacher	Alison Besley or delegate (refer to change note)

Stellar 100 & 150 Quick Setup Guide DUT

Printing of this document is not mandatory. The printing specifications below are provided for the purposes of local (regional) printing only. Printed copies cannot be ordered from Sydney.

1. TRANSLATION DESCRIPTION

Translation of 248555r2 Stellar 100 & 150 Quick Setup Guide ROW ENG

2. PRINT DETAILS

Dimensions:	Cover & text: A5 (148 x 210) ± 2mm finished.
Style:	Self-covered, double-sided Colour: 4-colour varnished Stock: 160gsm A2 Satin
Binding:	Saddle stitch for 88pp and under, burst bind for 89pp and over. Exceptions can be made for small runs printed via digital processing.
Art work:	As shown on following pages. If re-typeset, the same styles and sizes must be maintained. Where the colours indicated differ between <i>Style</i> (as stated above) and <i>Art work</i> , then the specifications provided for <i>Style</i> should be followed.
Manufacturer:	Outside printer. (Small quantities may be printed inhouse)

3. FOR ALL OTHER REQUIREMENTS, REFER TO RESMED SUPPLIER MANUAL AQP119.

4. WEB VERSIONS

This document appears as the following files for web publishing purposes:

248565_stellar-100-150_quick-setup-guide_row_dut.pdf

RESMED

Stellar™ 100

Stellar™ 150

INVASIEVE EN NIET-INVASIEVE
VENTILATOR

Handleiding voor snelle installatie


Nederlands




Respiratory Care Solutions
Making quality of care easy

Configuratie

Niet-invasief gebruik

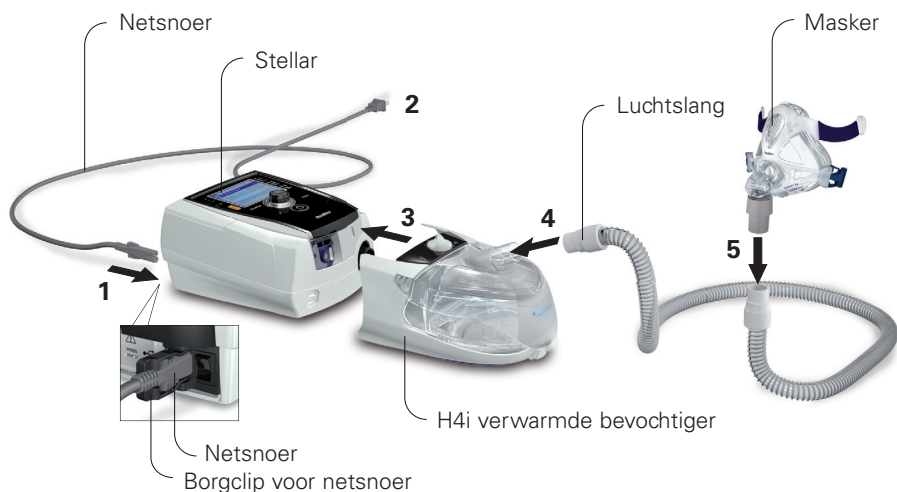

Invasief gebruik

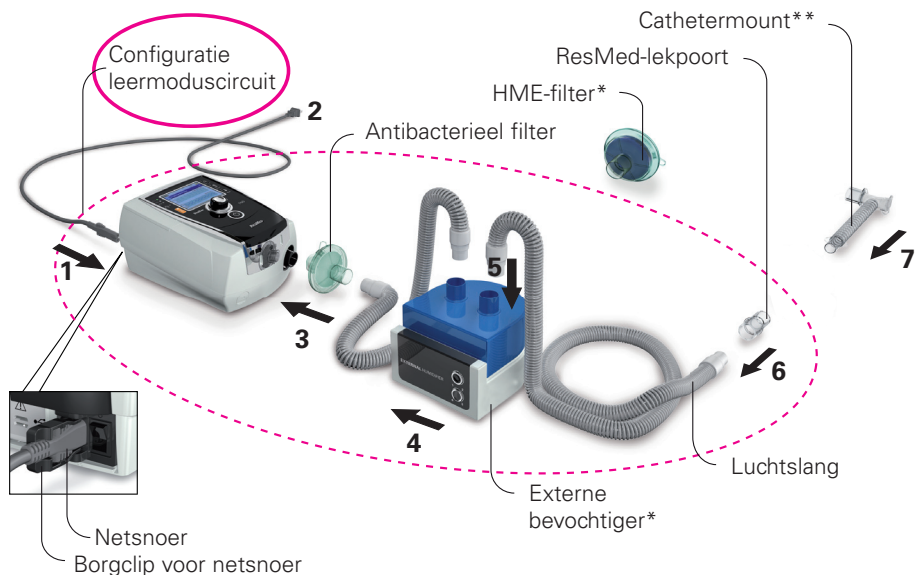

* Als u geen gebruik van een externe luchtbevochtiger maakt, sluit het HME-filter dan aan op de lekpoort.

** De lekpoort of het HME-filter kan worden aangesloten op gestandaardiseerde tracheaanule-interfases met verbindingstukken zoals een cathetermount.

De cathetermount en de externe bevochtiger zijn geen ResMed-onderdelen.

Over het bedieningspaneel

LED voor externe elektriciteitsvoorziening

Aan wanneer de externe accu aangesloten is.

LED voor interne accu

Aan wanneer de interne accu wordt gebruikt. Knippert wanneer apparaat uit staat en de accu aan het opladen is.

Alarm-LED

Rood of geel tijdens een alarmtoestand of het testen van een alarm.

LED op de knop Alarm dempen

Aan wanneer  is ingedrukt.

Knop Alarm dempen

- Schakel alarmgeluid uit
- Wis alarmbericht (alarmen met lage prioriteit).

LED voor netstroom

Aan bij werking op het elektriciteitsnet.

LCD-scherm

Menuknop

Navigeer door menu's.
Metingen
Instellingen
Info

Drukknop (draai-en-klik)

- Navigeer door instellingen.
- Wijzig waarden van instellingen.
- Voer uw selectie in en bevestig deze.

Therapie-LED


- Aan tijdens behandeling
- Knippert tijdens maskermontage.

Start-/stopknop

- Start/stop ventilatie.
- Start maskermontage (gedurende ten minste drie seconden ingedrukt houden).



Achterpaneel

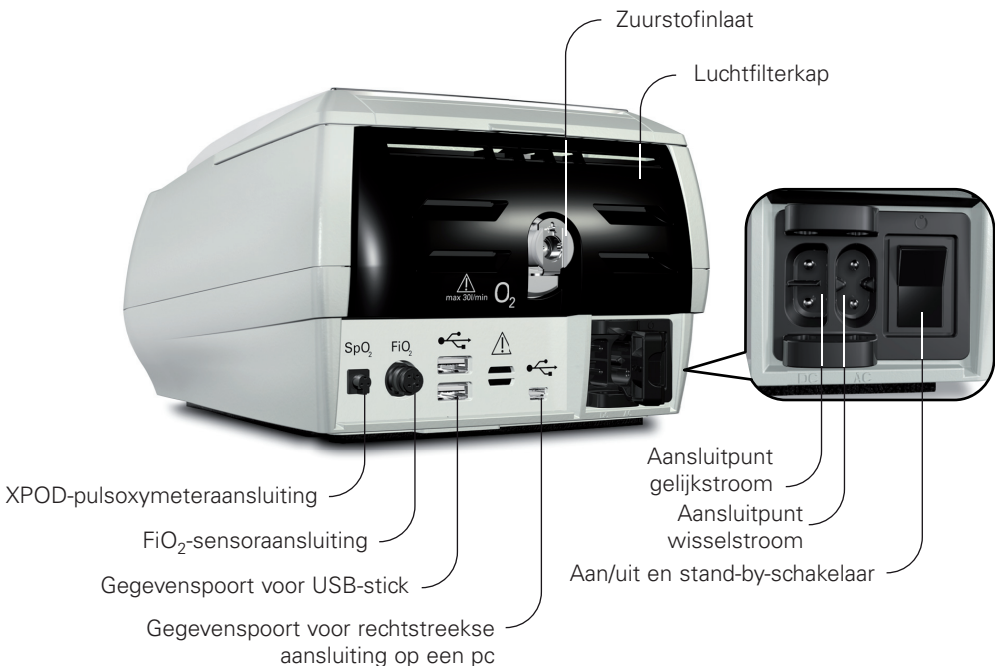

Ventilator aan- en uitzetten

Zet de ventilator aan door op de aan/uit-schakelaar aan de achterzijde van het apparaat te drukken. Wacht totdat het behandelingsscherm wordt weergegeven.

Zet de ventilator uit door op de aan/uit-schakelaar aan de achterzijde van het apparaat te drukken. Volg de instructies op het scherm.

Toegang tot de modus voor de arts




Druk drie seconden tegelijk op  en  totdat de opties voor de duur verschijnen. Volg de instructies op het scherm.

Druk ten minste drie seconden tegelijk op  en  om terug te keren naar het patiëntmenu.

Behandelingsinstellingen

Selecteer en bevestig de relevante optie met  om de aanloop in te stellen, de H4i-opwarmfunctie te starten (wanneer de bevochtiger is bevestigd) of een therapieprogramma te selecteren.

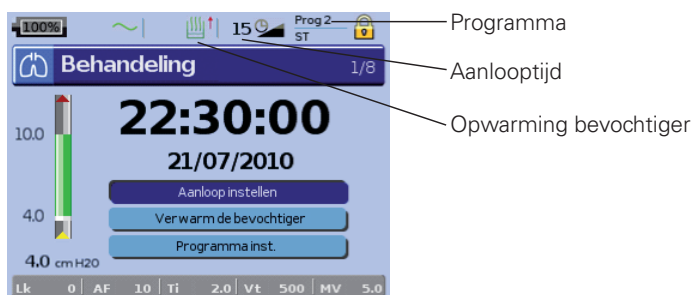


Er verschijnen gele pijlen boven en onder het staafdiagram dat de druk weergeeft, als het apparaat triggert of cyclet. Als de inademingsfase doorgaat voorbij de door Ti Min ingestelde spontane cyclus, verschijnt een rode pijl.

De menu's gebruiken


Menuoverzicht




METINGEN

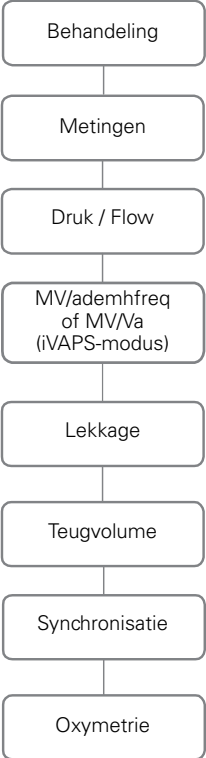

INSTELLINGEN

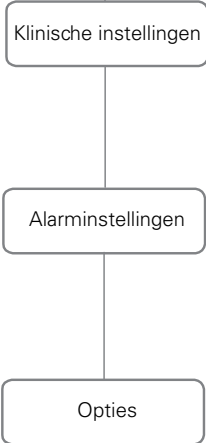

INFO

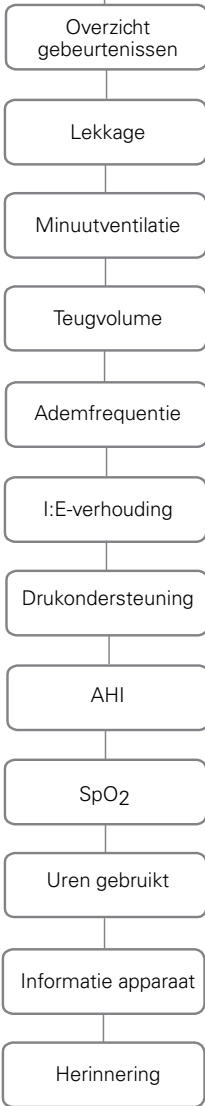

NB: De iVAPS-modus is alleen beschikbaar in Stellar 150.

Overzicht instellingen voor de arts



INSTELLINGEN

	Klinische instellingen			Geavanceerde instellingen		
CPAP-Modus	Modus CPAP	CPAP 8.0 cmH2O	Geavanceerde inst.	Maskertype Volgelaats		
S-Modus	Pathologie Normaal	Modus S	IPAP 10.0 cmH2O	Timin 0.3 sec	Timax 2.0 sec	Trigger MEDIUM
	EPAP 4.0 cmH2O	Geavanceerde inst.		Cyclus MEDIUM	Stijgtijd 150	Daaltijd 200
				Maskertype Volgelaats		
ST-Modus	Pathologie Normaal	Modus ST	IPAP 10.0 cmH2O	Timin 0.3 sec	Timax 2.0 sec	Trigger MEDIUM
	EPAP 4.0 cmH2O	Backup-freq 10 bpm	Geavanceerde inst.	Cyclus MEDIUM	Stijgtijd 150	Daaltijd 200
				Maskertype Volgelaats		
T-Modus	Pathologie Normaal	Modus T	IPAP 10.0 cmH2O	Stijgtijd 150	Daaltijd 200	Maskertype Volgelaats
	EPAP 4.0 cmH2O	Ti 1.5 sec	Ademfreq 10 bpm			
	Geavanceerde inst.					
iVAPS-Modus	Pathologie Normaal	Modus iVAPS	Hoogte 175 cm	Timin 0.3 sec	Timax 2.0 sec	Trigger MEDIUM
	Doelpat freq 15 bpm	Doel vent 5.2 L/min	Doel vent-calculator	Cyclus MEDIUM	Stijgtijd 150	Daaltijd 200
	EPAP 4.0 cmH2O	Leerdoelen	Geavanceerde inst.	Maskertype Volgelaats	Min PS 4.0 cmH2O	Max PS 15.0 cmH2O
PAC-Modus	Pathologie Normaal	Modus PAC	IPAP 10.0 cmH2O	Trigger MEDIUM	Stijgtijd 150	Daaltijd 200
	EPAP 4.0 cmH2O	Ti 1.5 sec	Backup-freq 10 bpm	Maskertype Volgelaats		
	Geavanceerde inst.					

NB: De iVAPS-modus is alleen beschikbaar in Stellar 150.

Overzicht alarminstellingen en opties



INSTELLINGEN

Alarminstellingen

Alarm	Aan/Uit	Instelling	Huidig	Eenheid
Zet alle alarm uit	Ja			
Lage min vent	Uit	2	2	L
Hoge lekkage	Aan	-	-	-
Niet-gevent. masker	Aan	-	-	-
Hoge druk	Uit	30	30	cm H ₂ O
Lage druk	Uit	-3	-3	cm H ₂ O
Hoge ademhfreq	Uit	50	50	bpm
Lage ademhfreq	Uit	6	6	bpm
SpO ₂ laag	Uit	85	85	%
Alarm FiO ₂ hoog	Uit	100	100	%
Alarm FiO ₂ laag	Uit	20	20	%
Apneu-alarm	Uit	20	20	sec
Alarm Volume	Medium			

Opties

Leercircuit	Kalibratie O ₂ -sensor	Smart Start Uit
Aanlooptijd 0 min	Startw. EPAP 4.0 cm H ₂ O	Max aanlooptijd 0 min
Fabrieksinstellingen	Config menu	

Configuratiemenu

Taal Nederlands	Helderheid 70.0 %	Achtergr.verl. Auto
Tijd 13:19:09	Datum 06/09/2011	Tijdnotatie 24u
Datumnotatie dd/mm/jjjj	Drukeenheid cm H₂O	Flow-eenheid L/min
Therapie-LED Uit	Stop bevest. Uit	Benaming druk IPAP/EPAP
Multiprogr. enkel	Lengte-eenheid cm	Geg. wissen

248565/1 2011-10

Handleiding voor
snelle installatie

Stellar 100

Stellar 150

QSG

ROW DUT

Standaardinstellingen pathologie

Instelling	Modus					Obstructieve longziekte	Restrictieve longziekte	Obesitas- hypoventilatie- syndroom	Normale long- mechanica
	S	ST	T	PAC	iVAPS				
IPAP [cm H ₂ O]	✓	✓	✓	✓		13	11	15	11
EPAP of PEEP [cm H ₂ O]	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	7	5
PS [cm H ₂ O]	✓	✓	✓	✓		8	6	8	6
Stijgtijd [ms]*	✓	✓	✓	✓	✓	150	300	300	200
Daaltijd [ms]*	✓	✓	✓	✓	✓	200	200	200	200
Triggergevoeligheid	✓	✓		✓	✓	Medium	Medium	Medium	Medium
Cyclegevoeligheid	✓	✓			✓	Hoog	Laag	Medium	Medium
Min PS [cm H ₂ O]					✓	4	4	4	2
Max PS [cm H ₂ O]					✓	20	20	18	20
Ti Min [sec]	✓	✓			✓	0,3	0,5	0,5	0,5
Ti Max [sec]	✓	✓			✓	1,0	1,5	1,5	1,5

*De stijg-/daaltijdschaal in milliseconden geeft slechts een benaderende aflezing.

NB: De iVAPS-modus is alleen beschikbaar in Stellar 150.

Zie de Stellar Handleiding voor de arts voor alle details.

 **Fabrikant:** ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Duitsland **Distributeur:** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australië. ResMed Corp 9001 Spectrum Center Blvd. San Diego, CA 92123 VS. ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY VK. Zie www.resmed.com voor andere ResMed-vestigingen wereldwijd. Stellar is een handelsmerk van ResMed Ltd. © 2011 ResMed Ltd.

